



Linka zákaznické péče: 0800 093 1812

V případě nouze kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo lékařskou záchranou službu.

Systém pro monitorování krevní glukózy AgaMatrix JAZZ umožňuje kontrolovat úroveň glukózy v plné krvi.

Základní kroky (úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce zařízení AgaMatrix JAZZ)

1 Zasuňte testovací proužek do měřicího přístroje:


Zasuňte testovací proužek kontakty umístěnými směrem nahoru do zásuvky určené pro testovací proužek. Měřicí přístroj se aktivuje.

UPOZORNĚNÍ: pro zajištění přesných výsledků si před testem omyjte ruce teplou mýdlovou vodou a osušte je.



2 Propíchněte místo pro testování:


Přitiskněte odběrové zařízení vzorku na místo pro testování a stiskněte uvolňovací tlačítko.

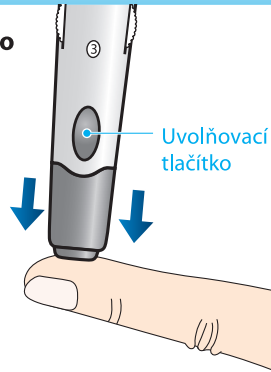

3 Rychlý odběr kapky krve:

Otřete první kapku krve, která se objeví, pomocí čistého ubrousku nebo papírového kapesníku.

Zatlačte směrem od kořene prstu ke konci, dokud nevyteče druhá malá kapka krve.

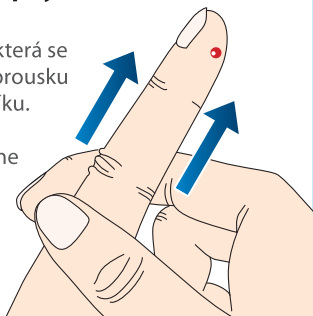

4 Přiložte testovací proužek ke kapce krve:


Testovací proužek AgaMatrix JAZZ nasaje krev prostřednictvím odběrného místa.



5 Jakmile měřicí přístroj pípne, sejměte testovací proužek z kapky krve:



Po odpočítání 1-2-3 (posouvající se sloupec na displeji) bude váš výsledek zobrazen na displeji.

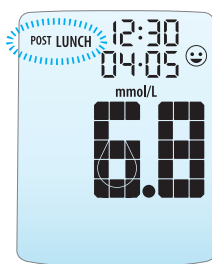

Bude problikávat značka doby jídla. Potvrdíte ji stisknutím tlačítka TICK (symbol zaškrtnutí). Chcete-li ji změnit nebo zobrazit další podrobnosti, podívejte se do uživatelské příručky.

6 Dokončení:

Vyjměte použitý testovací proužek. Měřicí přístroj se automaticky deaktivuje. Sejměte krytku odběrového zařízení a vyjměte lancetu. Použitý testovací proužek i lancetu řádně a bezpečně zlikvidujte.




Příprava odběrového zařízení

Výstraha:

Odběrové zařízení AgaMatrix MUSÍ být používáno POUZE za účelem získání vzorku krve jednou osobou pro vlastní testování. Nepoužívejte lancetu nebo odběrové zařízení, které používala jiná osoba.

1 Sejměte krytku odběrového zařízení.

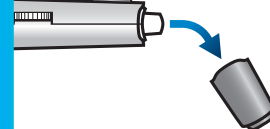


2 Zasuňte do držáku lancety novou lancetu.




3 Sejměte krytku lancety.




4 Nasadte krytku odběrového zařízení.

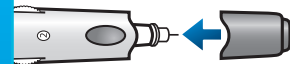

5 Nastavte úroveň hloubky odběru.

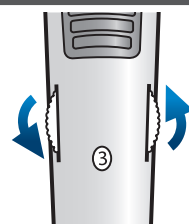

6 Zatáhněte za natahovací rukojeť, až cvakne.

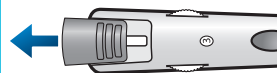

Přístroj pro měření krevní glukózy AgaMatrix JAZZ

Displej

Tlačítko TICK (symbol zaškrtnutí): potvrzení nebo provedení výběru v nabídce

Tlačítko se šipkou NAHORU: posun dozadu

Zásuvka pro testovací proužek



Tlačítko BACKLIGHT (podsvětlení): ZAPNE nebo VYPNE podsvětlení

Tlačítko se šipkou DOLŮ: posun dopředu

Testovací proužek AgaMatrix JAZZ

Kontakty: Tento konec zasouváte do zásuvky pro testovací proužek.

Okénko pro sledování plnění: jakmile je odebráno dostatečné množství vzorku, úplně se zaplní.

Odběrná místa: zde aplikujete krev nebo kontrolní roztok.



Odběrové zařízení AgaMatrix

Otočný ovladač nastavení hloubky

Držák lancety

Krytka odběrového zařízení



Natahovací rukojeť

Lanceta

Kryt lancety

Uvolňovací tlačítko

Krytka alternativního odběrného místa (čirá)