



PODRĘCZNIK SZYBKIEGO STARTU

Obsługa klienta: 0800 093 1812

W przypadku zdarzeń nagłych należy skontaktować się z pracownikiem ochrony zdrowia lub ośrodkiem ratownictwa medycznego.

System monitorowania poziomu glukozy we krwi AgaMatrix JAZZ umożliwia sprawdzanie poziomu glukozy w krwi pełnej.

Podstawowe kroki (pełne instrukcje znajdują się w Przewodniku użytkownika AgaMatrix JAZZ)

1 Wsunąć pasek diagnostyczny do glukometru:


Wsunąć pasek diagnostyczny do portu tak, aby paski styku były u góry. Glukometr włączy się automatycznie.

UWAGA: W celu uzyskania dokładnych wyników, należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i wysuszyć je przed każdym testem.



2 Nakłuć miejsce badania:


Przycisnąć nakłuwacz do miejsca nakłucia i nacisnąć przycisk wyzwalacza.

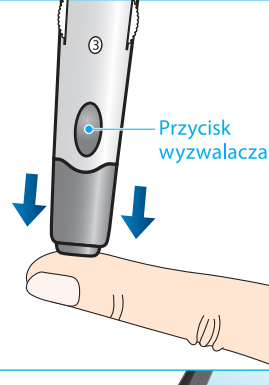

3 Wycisnąć kroplę krwi:


Zetrzeć pierwszą kroplę krwi przy użyciu czystej chusteczki lub ręcznika papierowego.

Ścisnąć palec od podstawy do koniuszka, aż utworzy się druga kropla krwi.

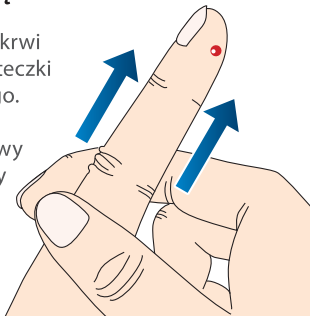


4 Przyłożyć pasek diagnostyczny do próbki krwi:

Pasek diagnostyczny AgaMatrix JAZZ pobiera krew przez miejsce pobierania próbki.

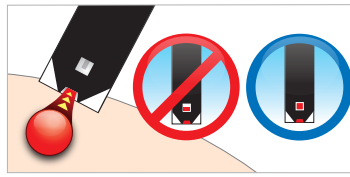

5 Po sygnale dźwiękowym wyciągnąć koniec paska diagnostycznego z próbki krwi:

Po zakończeniu odliczania 1-2-3 (pasek przewijania na ekranie) wynik testu zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.

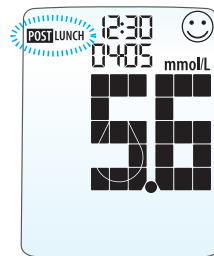


Znacznik czasu posiłku będzie migał. Aby zatwierdzić, należy nacisnąć przycisk ze znacznikiem wyboru. Aby dokonać zmian lub uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z przewodnikiem użytkownika.



6 Zakończenie:


Usunąć zużyty pasek diagnostyczny. Glukometr zostanie automatycznie wyłączony. Zdjąć nasadkę nakłuwacza i usunąć lancet. Pozbyć się zużytego paska diagnostycznego i lancetu w odpowiedni sposób.

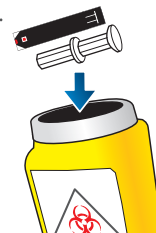

Przygotowywanie systemu nakłuwania

Ostrzeżenie: Nakłuwacz AgaMatrix może być używany WYŁĄCZNIE do pobierania próbki krwi przez jedną osobę w celu autokontroli. Nie należy używać lancetów lub nakłuwaczy używanych przez inną osobę.


1 Zdjąć nasadkę nakłuwacza.

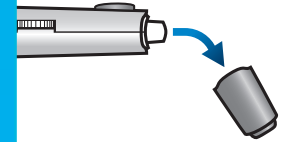


2 Włożyć nowy lancet do stosownego zagłębienia.




3 Zdjąć nasadkę lancetu.

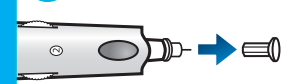

4 Ponownie nałożyć nasadkę nakłuwacza.

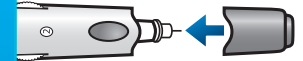

5 Ustawić poziom nakłuwania.

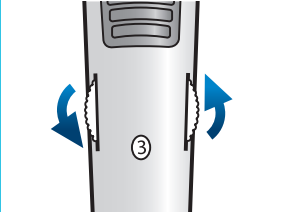

6 Wyciągnąć uchwyt sprężyny do momentu usłyszenia kliknięcia.



Glukometr AgaMatrix JAZZ

Wyświetlacz

Przycisk ze znacznikiem wyboru: potwierdzanie lub dokonywanie wyboru w menu

Przycisk strzałki w górę: przewijanie wstecz

Port na pasek diagnostyczny



Przycisk podświetlenia: włącza i wyłącza podświetlenie

Przycisk strzałki w dół: przewijanie w przód

Pasek diagnostyczny AgaMatrix JAZZ

Paski styku: ten koniec paska diagnostycznego należy włożyć do portu

Okienko wizualizacji napełnienia: wypełnia się w całości, gdy rozmiar próbki jest odpowiedni



Miejsce pobierania próbki: tutaj należy umieścić krew lub roztwór kontrolny


System nakłuwania AgaMatrix

Potencjometr dostosowywania głębokości

Okno wskaźnika głębokości

Zagłębienie na lancet

Nasadka nakłuwacza

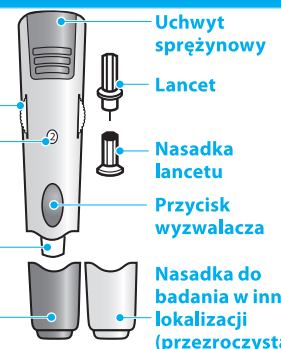

Uchwyt sprężynowy

Lancet

Nasadka lancetu

Przycisk wyzwalacza

Nasadka do badania w innej lokalizacji (przezroczysta)