

சுருக்க விரைவு வழிகாட்டி

வாடிக்கையாளர் சேவை: 0800 093 1812

அவசரநிலை ஏற்பட்டால், உங்கள் மருத்துவரை அல்லது அவசர மருத்துவ உதவியைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ஏகாமேட்ரிக்ஸ் ஜாஸ் பிளாட் குஞக்கோஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Monitoring System) உங்கள் இருத்தத்தின் குஞக்கோஸ் அளவுகளை சரிபார்க்க உதவுகிறது.

அடிப்படை செய்முறைகள் (முழுமையான செய்முறைகளை அறிய உங்கள் ஏகாமேட்ரிக்ஸ் உரிமையாளர் கையேட்டை (AgaMatrix JAZZ Owner's Guide) பார்க்கவும்)

1 சோதனை ஸ்டிரிப்பை மீட்டருக்குள் செருகவும்:




சோதனை ஸ்டிரிப்பின் காண்டாக்ட் பார்கள் பேற்படும் இருக்கும் வகையில் டெஸ்ட் ஸ்டிரிப் போர்ட்டில் செருகவும். மீட்டர் செயல்படத் துவங்கும்.

எச்சரிக்கை: துல்லியமான முடிவுகளைப் பெற, ஒவ்வொரு முறை சோதனை செய்வதற்கு முன்பும் இளம் குடான் சோவாட்டுத் தன்னிடில் கைகளைக் கழுவி உலர் விடவும்.


2 லேன்ஸ் சோதனை இடம்:

2 லேன்ஸ் சோதனை இடம்:

சோதனை இடத்தின்மீது லேன்சிங் கருவியை அழுத்தி வைத்து, ரில்ஸ் பொத்தானை அழுத்தவும்.

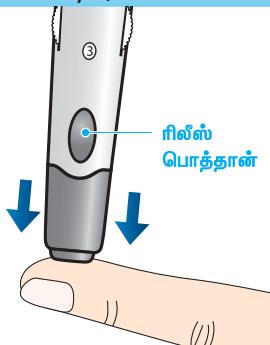

3 இரத்தத் துளி எடுத்தல்:

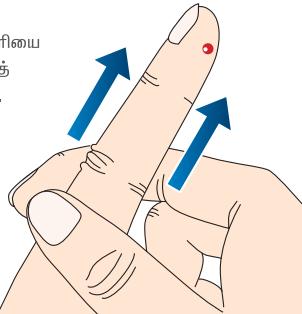


வெளிவருகிற முதல் இரத்தத் துளியை குத்தமான டிண்டி அல்லது காகிதத் துவாலையால் துடைத்து விடவும்.

இரண்டாவது இரத்தத் துளி சேரும் வளர் உங்கள் விரலின் அடிப்பகுதியை மேல் நோக்கி அழுத்தவும்.

5 மீட்டர் பீப் ஒலி எழுப்பியதும், சோதனை ஸ்டிரிப்பை இரத்தத்திலிருந்து எடுக்கவும்:



1-3 என (திரையில் ஸ்ட்ரோல் பாரில்)
மேலிருந்து கீழாக
எண்ணிக்கை
முடிந்த பிறகு
சோதனையின்
முடிவு திரையில்
தோன்றும்.

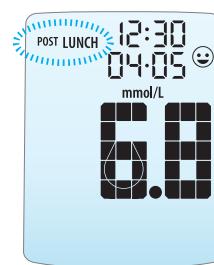

POST LUNCH

உணவுநேரம் என்னும் சேதி மின்னும்.
அதை உறுதி செய்ய டிக் பொத்தானை
அழுத்துக். அதை மாற்ற அல்லது மேலும்
விரைம் அறிய உரிமையாளர் கையேட்டைப்
பார்க்கவும்.

6 நிறைவு செய்தல்:

பயன்படுத்திய டெஸ்ட் ஸ்டிரிப்பை நீக்கவும். மீட்டர் தானாகவே அமையின்துவிடும். லேன்சிங் கருவியை மூடியை குண்டித் திறந்து லேன்ஸ்டெட் நீக்கவும். பயன்படுத்திய ஸ்டிரிப் மற்றும் லேன்ஸ்டெட் முறையாக கழித்துக் கட்டவும்.





குறியீடு இல்லை



லேன்சிங் கருவி தயார் செய்தல்

எகாமேட்ரிக்ஸ் லேன்சிங் கருவியை மாரோனும் ஓரே ஒரு நபர் மட்டும்தான் கூட இரத்தப் பரிசோதனை செய்ய இருத்த மாதிரி எடுக்கப் பயன்படுத்த வேண்டும். வேறு ஒருவர் பயன்படுத்திய லேன்ஸ்ட் அல்லது லேன்சிங் கருவியை மற்றொருவர் பயன்படுத்தக் கூடாது.

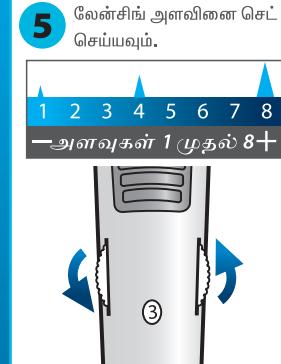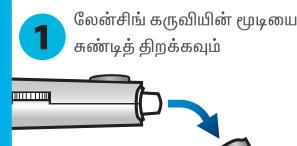

ஏகாமேட்ரிக்ஸ் ஜாஸ் பிளாட் குஞக்கோஸ் மீட்டர்



காட்சித்திரை

டிக் பொத்தான்:

மெனுவில் ஏதேனும் ஒன்றை உறுதி செய்ய அல்லது தேவை செப்ப

அப் ஏரோ பொத்தான்:

பின்னோக்கிச் செல்ல டெஸ்ட் ஸ்டிரிப் போர்ட்

பேக்ஸல் பொத்தான்:

திரையின் விளக்கை இயக்க அல்லது அணைக்க அனைக்க

டவுன் ஏரோ

பொத்தான்: முன்னே செல்ல

காண்டாக்ட் பார்கள்:

இந்த முனையை சோதனை ஸ்டிரிப் போர்ட்டில் செருகவும்.


விஷாவல் ஃபில் வின்டோ:

போதுமான சாம்பிள் கிடைத்தும் இது நிறைவேண்டும் விடும்

சேம்பிள் ஏரியா:

இருத்த அல்லது கண்ட்ரோல் சொல்லுவதன் இங்கே இடவும்

ஏகாமேட்ரிக்ஸ் லேன்சிங் சிஸ்டம்

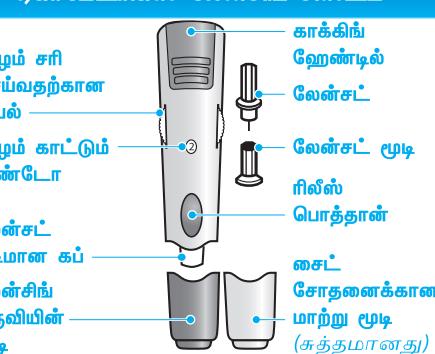

ஆழம் சரி செய்வதற்கான டயல்

ஆழம் காட்டும் வின்டோ

லேன்ஸ்ட் பிழிமான் கப்

லேன்சிங் கருவியின் மூடி

காக்கிங் கைப்பிடியை கிளிக் சுத்தம் கேட்கும் வரை இழுக்கவும்.