



# দ্রুত শুরু করার নির্দেশিকা

অ্যাগাম্যাট্রিক্স ওয়েভসেন্স জ্যাজ (AgaMatrix WaveSense JAZZ™) ওয়্যারলেস রক্তের ফ্লকোজ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা



Bluetooth® ওয়্যারলেস টেকনলজির  
মাধ্যমে স্থানিকভাবে অ্যাপের সঙ্গে সিঙ্ক করে নিন

দ্রষ্টব্য: পরীক্ষা করার আগে মিটারের সময় ও তারিখ সেট করে নেওয়ার জন্য আপনার  
মিটার অ্যাগাম্যাট্রিক্স ডায়াবেটিস ম্যানেজার অ্যাপ (অ্যাপ)-এর সঙ্গে সিঙ্ক অর্থাৎ সমন্বিত  
করে নেওয়া উচিত। এইভাবে সুনির্ভিত করা যাবে যে মিটারের ফলাফল বিনা তারে  
অ্যাপে পাঠানো হয়েছে।

## ব্যাটারি বদলানোর নির্দেশ

গুরুত্বপূর্ণ: অ্যাগাম্যাট্রিক্স ওয়েভসেন্স জ্যাজ ওয়্যারলেস মিটারে কেবলমাত্র CR2032 বা DL2032  
ব্যাটারি ব্যবহার করবেন।

### ব্যাটারিতে বার্তা দেখানো



কম ব্যাটারির বার্তা: (2 সেকেন্ডের জন্য এই বার্তা দেখা যায়।)  
কম ব্যাটারির বার্তা দেখলেও আপনি সেট করতে পারেন, তবে যত শীঘ্র সম্ভব  
ব্যাটারি বদলে দিতে হবে কেবলমাত্র CR2032 বা DL2032 ব্যাটারি  
ব্যবহার করবেন।



ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ার বার্তা: আপনার মিটার সক্রিয় করা ও টেস্ট  
করার মত যথেষ্ট শক্তি আপনার মিটারের ব্যাটারিতে নেই; ব্যাটারি  
বদলানো দরকার।

### ব্যাটারি বদলানো: (আরো বিবরণের জন্য, আপনার অ্যাগাম্যাট্রিক্স ওয়েভসেন্স জ্যাজ ওয়্যারলেস ওনার্স গাইড দেখুন)

গুরুত্বপূর্ণ: যখন ব্যাটারি বদলানো হবে তখন আপনার মিটার থেকে সময় ও তারিখ মুছে যাবে।  
আপনার রীডিং-এ যাতে সময় ও তারিখ থাকে তা সুনির্ভিত করতে আপনার সমর্থক যন্ত্রের  
সঙ্গে আপনার মিটার অবশ্যই সিঙ্ক করে নিতে হবে। আপনার মিটার সিঙ্ক করতে, ডানদিকের  
নির্দেশগুলি দেখুন।

দ্রষ্টব্য: ব্যাটারি সরিয়ে দেওয়া হলে, ফ্লকোজের যে রেকর্ডগুলি জমা হয়ে আছে তাতে কোন প্রভাব  
পড়বে না।


### 1 ব্যাটারির কপাট খুলন:

লক্ষ্য রাখবেন মিটার যেন বক্ষ থাকে মিটার ঘোরান যাতে আপনি  
ব্যাটারির কপাট দেখতে পান। মিটার থেকে ব্যাটারির কপাট প্লাইড  
করে খুলে ফেলুন।




### 2 ব্যবহৃত ব্যাটারি সরিয়ে ফেলুন:

ধাতব নয় এমন জিনিস দিয়ে ব্যবহৃত ব্যাটারি সরিয়ে নিন।

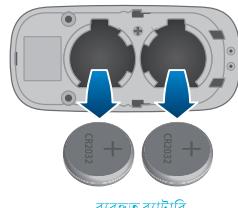

### 3 নতুন ব্যাটারি বসিয়ে নিন:

আপনার মিটারের ক্যারিং কেসের পকেটে দুটি  
রিপ্লেসমেন্ট ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। বদলানোর  
ব্যাটারিগুলি খুঁজে বার করে নিন।

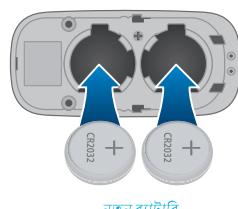

### 4 ব্যাটারির কপাট বন্ধ করে নিন:

প্লাইড করে ব্যাটারির কপাট মিটারে চুকিয়ে দিন। মিটার ব্যবহার  
করার আগে সুনির্ভিত করে নেনেন ব্যাটারির কপাট যেন সম্পূর্ণ  
বন্ধ থাকে।



আপনার স্থানীয় পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মানুসার ব্যবহৃত ব্যাটারি  
ফেলে দেবেন।

## জোট বাঁধা ও সিঙ্ক করার নির্দেশ

অ্যাগাম্যাট্রিক্স ডায়াবেটিস ম্যানেজার অ্যাপ বিভিন্ন আইওএস এবং Android™ ডিভাইসে কাজ  
করে সাপ্তাহিকভাবে তালিকার জন্য [www.agamatrix.co.uk](http://www.agamatrix.co.uk) দেখুন।

### অ্যাপের সঙ্গে আপনার মিটার জোট বাঁধা ও সিঙ্ক করা

ফ্লকোজের ফলাফল সরাসরি আপনার আইওএস বা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের সঙ্গে সিঙ্ক করার  
জন্য অ্যাগাম্যাট্রিক্স ওয়েভসেন্স জ্যাজ ওয়্যারলেস মিটার অ্যাগাম্যাট্রিক্স ডায়াবেটিস ম্যানেজার  
অ্যাপের (অ্যাপ) সঙ্গে ব্যবহার করবেন।

পরীক্ষা করার আগে আপনার মিটারের সময় ও তারিখ সেট করার জন্য আপনার মিটার  
অ্যাগাম্যাট্রিক্স ডায়াবেটিস ম্যানেজার অ্যাপের (অ্যাপ) সঙ্গে সিঙ্ক করে নেওয়া উচিত। সময় ও  
তারিখ সেট না করা হলে আপনার মিটারে পরীক্ষার ফলাফল সময় ও তারিখের বদলে  
“--:--” এবং “--/-/-” দিয়ে দেখানো হবে।

### 1 অ্যাপ ডাউনলোড করে খুলে নিন:

(অ্যাপল ডিভাইসের জন্য) App StoreSM বা (অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের  
জন্য) Google Play™ থেকে অ্যাগাম্যাট্রিক্স ডায়াবেটিস ম্যানেজার অ্যাপ  
(অ্যাপ) ডাউনলোড করে নিন।

আপনার সমর্থিত ডিভাইসে অ্যাপ আইকনে ট্যাপ করুন।



### 2 ন্যাভিগেট করে মেনু আইকন দেখুন:

তিনি সারিয়ে মেনু আইকনে ট্যাপ করুন।



### 3 একটা নতুন মিটার যোগ করুন:

“মিটার”-এ ট্যাপ করুন। নতুন মিটার যুক্ত করার “অ্যাড নিউ মিটার”-এ ট্যাপ করুন।  
আপনার মিটারে, মিটারের বোতাম টিপে ধরে রাখুন। অ্যাপে আপনার মিটার দেখার পর সেট  
বেছে নিন।

### 4 পাসকী (passkey) জানান:

মিটারে 6-সংখ্যার পাসকী ফুটে উঠবো  
অ্যাপে এ পাসকী নম্বর টাইপ করে দিন।

পাসকীর উদাহরণ:

\* 354270

### 5 সফলভাবে জোট বাঁধা প্রত্যয়ন করুন:


মিটার ও অ্যাপ দুটিতেই জানানো হবে যে সফলভাবে  
জোট বাঁধা হয়েছে। মিটারে একটা টিক চিহ্ন দেখা যাবে ও  
অ্যাপে একটা বার্তা দেখানো হবে।

টিক চিহ্নের উদাহরণ:



### 6 ডেটা সিঙ্ক করা:

আপনার ডিভাইসের সঙ্গে আপনার মিটার জোট বাঁধার পর, যখনই সেটা আপনার জোট বাঁধা  
ডিভাইসের কাছাকাছি থাকবে, সেটা ডেটা পাঠিয়ে দেবে বা “সিঙ্ক” করে দেবে।

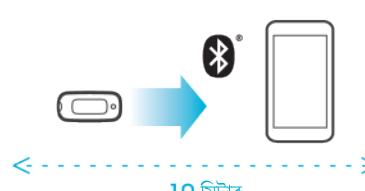

10 মিটার

দ্রষ্টব্য: জোট বাঁধা ও ডেটা পাঠানোর জন্য মিটার ও অ্যাপের 10 মিটারের পরিধিমধ্যে  
থাকতে হবে।



0123 AgaMatrix, Inc. 7C Raymond Ave  
Salem, NH 03079 USA



MDSS GmbH, Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

Bluetooth® শব্দ চিহ্ন ও লোগো মালিক Bluetooth® SIG, Inc. এবং AgaMatrix, Inc. যখনই এই চিহ্নটি ব্যবহার করে থাকে তা স্বতন্ত্র সম্পর্কে নির্ভর না।  
অ্যাপ্লিকেশন নাম তাদের ব্যক্তিগত মালিকদের সম্পর্কে নির্ভর না। Apple এবং আইপড, iPhone, iPad, iPod touch, iPod nano, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Plus, iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Plus, iPhone 19, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Plus, iPhone 20, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max, iPhone 20 Plus, iPhone 21, iPhone 21 Pro, iPhone 21 Pro Max, iPhone 21 Plus, iPhone 22, iPhone 22 Pro, iPhone 22 Pro Max, iPhone 22 Plus, iPhone 23, iPhone 23 Pro, iPhone 23 Pro Max, iPhone 23 Plus, iPhone 24, iPhone 24 Pro, iPhone 24 Pro Max, iPhone 24 Plus, iPhone 25, iPhone 25 Pro, iPhone 25 Pro Max, iPhone 25 Plus, iPhone 26, iPhone 26 Pro, iPhone 26 Pro Max, iPhone 26 Plus, iPhone 27, iPhone 27 Pro, iPhone 27 Pro Max, iPhone 27 Plus, iPhone 28, iPhone 28 Pro, iPhone 28 Pro Max, iPhone 28 Plus, iPhone 29, iPhone 29 Pro, iPhone 29 Pro Max, iPhone 29 Plus, iPhone 30, iPhone 30 Pro, iPhone 30 Pro Max, iPhone 30 Plus, iPhone 31, iPhone 31 Pro, iPhone 31 Pro Max, iPhone 31 Plus, iPhone 32, iPhone 32 Pro, iPhone 32 Pro Max, iPhone 32 Plus, iPhone 33, iPhone 33 Pro, iPhone 33 Pro Max, iPhone 33 Plus, iPhone 34, iPhone 34 Pro, iPhone 34 Pro Max, iPhone 34 Plus, iPhone 35, iPhone 35 Pro, iPhone 35 Pro Max, iPhone 35 Plus, iPhone 36, iPhone 36 Pro, iPhone 36 Pro Max, iPhone 36 Plus, iPhone 37, iPhone 37 Pro, iPhone 37 Pro Max, iPhone 37 Plus, iPhone 38, iPhone 38 Pro, iPhone 38 Pro Max, iPhone 38 Plus, iPhone 39, iPhone 39 Pro, iPhone 39 Pro Max, iPhone 39 Plus, iPhone 40, iPhone 40 Pro, iPhone 40 Pro Max, iPhone 40 Plus, iPhone 41, iPhone 41 Pro, iPhone 41 Pro Max, iPhone 41 Plus, iPhone 42, iPhone 42 Pro, iPhone 42 Pro Max, iPhone 42 Plus, iPhone 43, iPhone 43 Pro, iPhone 43 Pro Max, iPhone 43 Plus, iPhone 44, iPhone 44 Pro, iPhone 44 Pro Max, iPhone 44 Plus, iPhone 45, iPhone 45 Pro, iPhone 45 Pro Max, iPhone 45 Plus, iPhone 46, iPhone 46 Pro, iPhone 46 Pro Max, iPhone 46 Plus, iPhone 47, iPhone 47 Pro, iPhone 47 Pro Max, iPhone 47 Plus, iPhone 48, iPhone 48 Pro, iPhone 48 Pro Max, iPhone 48 Plus, iPhone 49, iPhone 49 Pro, iPhone 49 Pro Max, iPhone 49 Plus, iPhone 50, iPhone 50 Pro, iPhone 50 Pro Max, iPhone 50 Plus, iPhone 51, iPhone 51 Pro, iPhone 51 Pro Max, iPhone 51 Plus, iPhone 52, iPhone 52 Pro, iPhone 52 Pro Max, iPhone 52 Plus, iPhone 53, iPhone 53 Pro, iPhone 53 Pro Max, iPhone 53 Plus, iPhone 54, iPhone 54 Pro, iPhone 54 Pro Max, iPhone 54 Plus, iPhone 55, iPhone 55 Pro, iPhone 55 Pro Max, iPhone 55 Plus, iPhone 56, iPhone 56 Pro, iPhone 56 Pro Max, iPhone 56 Plus, iPhone 57, iPhone 57 Pro, iPhone 57 Pro Max, iPhone 57 Plus, iPhone 58, iPhone 58 Pro, iPhone 58 Pro Max, iPhone 58 Plus, iPhone 59, iPhone 59 Pro, iPhone 59 Pro Max, iPhone 59 Plus, iPhone 60, iPhone 60 Pro, iPhone 60 Pro Max, iPhone 60 Plus, iPhone 61, iPhone 61 Pro, iPhone 61 Pro Max, iPhone 61 Plus, iPhone 62, iPhone 62 Pro, iPhone 62 Pro Max, iPhone 62 Plus, iPhone 63, iPhone 63 Pro, iPhone 63 Pro Max, iPhone 63 Plus, iPhone 64, iPhone 64 Pro, iPhone 64 Pro Max, iPhone 64 Plus, iPhone 65, iPhone 65 Pro, iPhone 65 Pro Max, iPhone 65 Plus, iPhone 66, iPhone 66 Pro, iPhone 66 Pro Max, iPhone 66 Plus, iPhone 67, iPhone 67 Pro, iPhone 67 Pro Max, iPhone 67 Plus, iPhone 68, iPhone 68 Pro, iPhone 68 Pro Max, iPhone 68 Plus, iPhone 69, iPhone 69 Pro, iPhone 69 Pro Max, iPhone 69 Plus, iPhone 70, iPhone 70 Pro, iPhone 70 Pro Max, iPhone 70 Plus, iPhone 71, iPhone 71 Pro, iPhone 71 Pro Max, iPhone 71 Plus, iPhone 72, iPhone 72 Pro, iPhone 72 Pro Max, iPhone 72 Plus, iPhone 73, iPhone 73 Pro, iPhone 73 Pro Max, iPhone 73 Plus, iPhone 74, iPhone 74 Pro, iPhone 74 Pro Max, iPhone 74 Plus, iPhone 75, iPhone 75 Pro, iPhone 75 Pro Max, iPhone 75 Plus, iPhone 76, iPhone 76 Pro, iPhone 76 Pro Max, iPhone 76 Plus, iPhone 77, iPhone 77 Pro, iPhone 77 Pro Max, iPhone 77 Plus, iPhone 78, iPhone 78 Pro, iPhone 78 Pro Max, iPhone 78 Plus, iPhone 79, iPhone 79 Pro, iPhone 79 Pro Max, iPhone 79 Plus, iPhone 80, iPhone 80 Pro, iPhone 80 Pro Max, iPhone 80 Plus, iPhone 81, iPhone 81 Pro, iPhone 81 Pro Max, iPhone 81 Plus, iPhone 82, iPhone 82 Pro, iPhone 82 Pro Max, iPhone 82 Plus, iPhone 83, iPhone 83 Pro, iPhone 83 Pro Max, iPhone 83 Plus, iPhone 84, iPhone 84 Pro, iPhone 84 Pro Max, iPhone 84 Plus, iPhone 85, iPhone 85 Pro, iPhone 85 Pro Max, iPhone 85 Plus, iPhone 86, iPhone 86 Pro, iPhone 86 Pro Max, iPhone 86 Plus, iPhone 87, iPhone 87 Pro, iPhone 87 Pro Max, iPhone 87 Plus, iPhone 88, iPhone 88 Pro, iPhone 88 Pro Max, iPhone 88 Plus, iPhone 89, iPhone 89 Pro, iPhone 89 Pro Max, iPhone 89 Plus, iPhone 90, iPhone 90 Pro, iPhone 90 Pro Max, iPhone 90 Plus, iPhone 91, iPhone 91 Pro, iPhone 91 Pro Max, iPhone 91 Plus, iPhone 92, iPhone 92 Pro, iPhone 92 Pro Max, iPhone 92 Plus, iPhone 93, iPhone 93 Pro, iPhone 93 Pro Max, iPhone 93 Plus, iPhone 94, iPhone 94 Pro, iPhone 94 Pro Max, iPhone 94 Plus, iPhone 95, iPhone 95 Pro, iPhone 95 Pro Max, iPhone 95 Plus, iPhone 96, iPhone 96 Pro, iPhone 96 Pro Max, iPhone 96 Plus, iPhone 97, iPhone 97 Pro, iPhone 97 Pro Max, iPhone 97 Plus, iPhone 98, iPhone 98 Pro, iPhone 98 Pro Max, iPhone 98 Plus, iPhone 99, iPhone 99 Pro, iPhone 99 Pro Max, iPhone 99 Plus, iPhone 100, iPhone 100 Pro, iPhone 100 Pro Max, iPhone 100 Plus, iPhone 101, iPhone 101 Pro, iPhone 101 Pro Max, iPhone 101 Plus, iPhone 102, iPhone 102 Pro, iPhone 102 Pro Max, iPhone 102 Plus, iPhone 103, iPhone 103 Pro, iPhone 103 Pro Max, iPhone 103 Plus, iPhone 104, iPhone 104 Pro, iPhone 104 Pro Max, iPhone 104 Plus, iPhone 105, iPhone 105 Pro, iPhone 105 Pro Max, iPhone 105 Plus, iPhone 106, iPhone 106 Pro, iPhone 106 Pro Max, iPhone 106 Plus, iPhone 107, iPhone 107 Pro, iPhone 107 Pro Max, iPhone 107 Plus, iPhone 108, iPhone 108 Pro, iPhone 108 Pro Max, iPhone 108 Plus, iPhone 109, iPhone 109 Pro, iPhone 109 Pro Max, iPhone 109 Plus, iPhone 110, iPhone 110 Pro, iPhone 110 Pro Max, iPhone 110 Plus, iPhone 111, iPhone 111 Pro, iPhone 111 Pro Max, iPhone 111 Plus, iPhone 112, iPhone 112 Pro, iPhone 112 Pro Max, iPhone 112 Plus, iPhone 113, iPhone 113 Pro, iPhone 113 Pro Max, iPhone 113 Plus, iPhone 114, iPhone 114 Pro, iPhone 114 Pro Max, iPhone 114 Plus, iPhone 115, iPhone 115 Pro, iPhone 115 Pro Max, iPhone 115 Plus, iPhone 116, iPhone 116 Pro, iPhone 116 Pro Max, iPhone 116 Plus, iPhone 117, iPhone 117 Pro, iPhone 117 Pro Max, iPhone 117 Plus, iPhone 118, iPhone 118 Pro, iPhone 118 Pro Max, iPhone 118 Plus, iPhone 119, iPhone 119 Pro, iPhone 119 Pro Max, iPhone 119 Plus, iPhone 120, iPhone 120 Pro, iPhone 120 Pro Max, iPhone 120 Plus, iPhone 121, iPhone 121 Pro, iPhone 121 Pro Max, iPhone 121 Plus, iPhone 122, iPhone 122 Pro, iPhone 122 Pro Max, iPhone 122 Plus, iPhone 123, iPhone 123 Pro, iPhone 123 Pro Max, iPhone 123 Plus, iPhone 124, iPhone 124 Pro, iPhone 124 Pro Max, iPhone 124 Plus, iPhone 125, iPhone 125 Pro, iPhone 125 Pro Max, iPhone 125 Plus, iPhone 126, iPhone 126 Pro, iPhone 126 Pro Max, iPhone 126 Plus, iPhone 127, iPhone 127 Pro, iPhone 127 Pro Max, iPhone 127 Plus, iPhone 128, iPhone 128 Pro, iPhone 128 Pro Max, iPhone 128 Plus, iPhone 129, iPhone 129 Pro, iPhone 129 Pro Max, iPhone 129 Plus, iPhone 130, iPhone 130 Pro, iPhone 130 Pro Max, iPhone 130 Plus, iPhone 131, iPhone 131 Pro, iPhone 131 Pro Max, iPhone 131 Plus, iPhone 132, iPhone 132 Pro, iPhone 132 Pro Max, iPhone 132 Plus, iPhone 133, iPhone 133 Pro, iPhone 133 Pro Max, iPhone 133 Plus, iPhone 134, iPhone 134 Pro, iPhone 134 Pro Max, iPhone 134 Plus, iPhone 135, iPhone 135 Pro, iPhone 135 Pro Max, iPhone 135 Plus, iPhone 136, iPhone 136 Pro, iPhone 136 Pro Max, iPhone 136 Plus, iPhone 137, iPhone 137 Pro, iPhone 137 Pro Max, iPhone 137 Plus, iPhone 138, iPhone 138 Pro, iPhone 138 Pro Max, iPhone 138 Plus, iPhone 139, iPhone 139 Pro, iPhone 139 Pro Max, iPhone 139 Plus, iPhone 140, iPhone 140 Pro, iPhone 140 Pro Max, iPhone 140 Plus, iPhone 141, iPhone 141 Pro, iPhone 141 Pro Max, iPhone 141 Plus, iPhone 142, iPhone 142 Pro, iPhone 142 Pro Max, iPhone 142 Plus, iPhone 143, iPhone 143 Pro, iPhone 143 Pro Max, iPhone 143 Plus, iPhone 144, iPhone 144 Pro, iPhone 144 Pro Max, iPhone 144 Plus, iPhone 145, iPhone 145 Pro, iPhone 145 Pro Max, iPhone 145 Plus, iPhone 146, iPhone 146 Pro, iPhone 146 Pro Max, iPhone 146 Plus, iPhone 147, iPhone 147 Pro, iPhone 147 Pro Max, iPhone 147 Plus, iPhone 148, iPhone 148 Pro, iPhone 148 Pro Max, iPhone 148 Plus, iPhone 149, iPhone 149 Pro, iPhone 149 Pro Max, iPhone 149 Plus, iPhone 150, iPhone 150 Pro, iPhone 150 Pro Max, iPhone 150 Plus, iPhone 151, iPhone 151 Pro, iPhone 151 Pro Max, iPhone 151 Plus, iPhone 152, iPhone 152 Pro, iPhone 152 Pro Max, iPhone 152 Plus, iPhone 153, iPhone 153 Pro, iPhone 153 Pro Max, iPhone 153 Plus, iPhone 154, iPhone 154 Pro, iPhone 154 Pro Max, iPhone 154 Plus, iPhone 155, iPhone 155 Pro, iPhone 155 Pro Max, iPhone 155 Plus, iPhone 156, iPhone 156 Pro, iPhone 156 Pro Max, iPhone 156 Plus, iPhone 157, iPhone 157 Pro, iPhone 157 Pro Max, iPhone 157 Plus, iPhone 158, iPhone 158 Pro, iPhone 158 Pro Max, iPhone 158 Plus, iPhone 159, iPhone 159 Pro, iPhone 159 Pro Max, iPhone 159 Plus, iPhone 160, iPhone 160 Pro, iPhone 160 Pro Max, iPhone 160 Plus, iPhone 161, iPhone 161 Pro, iPhone 161 Pro Max, iPhone 161 Plus, iPhone 162, iPhone 162 Pro, iPhone 162 Pro Max, iPhone 162 Plus, iPhone 163, iPhone 163 Pro, iPhone 163 Pro Max, iPhone 163 Plus, iPhone 164, iPhone 164 Pro, iPhone 164 Pro Max, iPhone 164 Plus, iPhone 165, iPhone 165 Pro, iPhone 165 Pro Max, iPhone 165 Plus, iPhone 166, iPhone 166 Pro, iPhone 166 Pro Max, iPhone 166 Plus, iPhone 167, iPhone 167 Pro, iPhone 167 Pro Max, iPhone 167 Plus, iPhone 168, iPhone 168 Pro, iPhone 168 Pro Max, iPhone 168 Plus, iPhone 169, iPhone 169 Pro, iPhone 169 Pro Max, iPhone 169 Plus, iPhone 170, iPhone 170 Pro, iPhone 170 Pro Max, iPhone 170 Plus, iPhone 171, iPhone 171 Pro, iPhone 171 Pro Max, iPhone 171 Plus, iPhone 172, iPhone 172 Pro, iPhone 172 Pro Max, iPhone 172 Plus, iPhone 173, iPhone 173 Pro, iPhone 173 Pro Max, iPhone 173 Plus, iPhone 174, iPhone 174 Pro, iPhone 174 Pro Max, iPhone 174 Plus, iPhone 175, iPhone 175 Pro, iPhone 175 Pro Max, iPhone 175 Plus, iPhone 176, iPhone 176 Pro, iPhone 176 Pro Max, iPhone 176 Plus, iPhone 177, iPhone 177 Pro, iPhone 177 Pro Max, iPhone 177 Plus, iPhone 178, iPhone 178 Pro, iPhone 178 Pro Max, iPhone 178 Plus, iPhone 179, iPhone 179 Pro, iPhone 179 Pro Max, iPhone 179 Plus, iPhone 180, iPhone 180 Pro, iPhone 180 Pro Max, iPhone 180 Plus, iPhone 181, iPhone 181 Pro, iPhone 181 Pro Max, iPhone 181 Plus, iPhone 182, iPhone 182 Pro, iPhone 182 Pro Max, iPhone 182 Plus, iPhone 183, iPhone 183 Pro, iPhone 183 Pro Max, iPhone 183 Plus, iPhone 184, iPhone 184 Pro, iPhone 184 Pro Max, iPhone 184 Plus, iPhone 185, iPhone 185 Pro, iPhone 185 Pro Max, iPhone 185 Plus, iPhone 186, iPhone 186 Pro, iPhone 186 Pro Max, iPhone 186 Plus, iPhone 187, iPhone 187 Pro, iPhone 187 Pro Max, iPhone 187 Plus, iPhone 188, iPhone 188 Pro, iPhone 188 Pro Max, iPhone 188 Plus, iPhone 189, iPhone 189 Pro, iPhone 189 Pro Max, iPhone 189 Plus, iPhone 190, iPhone 190 Pro, iPhone 190 Pro Max, iPhone 190 Plus, iPhone 191, iPhone 191 Pro, iPhone 191 Pro Max, iPhone 191 Plus, iPhone 192, iPhone 192 Pro, iPhone 192 Pro Max, iPhone 192 Plus, iPhone 193, iPhone 193 Pro, iPhone 193 Pro Max, iPhone 193 Plus, iPhone 194, iPhone 194 Pro, iPhone 194 Pro Max, iPhone