

# ਕੁਇਕ ਸਟਾਰਟ ਗਾਈਡ

ਐਗਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ (AgaMatrix WaveSense JAZZ™) ਵਾਇਰਲੈਸ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ: 0800 093 1812

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

## AgaMatrix



ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ  
**Bluetooth®** ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ

ਜੁੜਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ (ਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਕਰਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ।

**ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਬਦਲਣ ਲਈ) ਬੈਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ !**

ਦੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ CR2032, 3-ਵੋਲਟ, ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੈਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ।

### ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ

ਐਗਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਿਲਰੀ ਹੋਲ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਓਨਰ'ਸ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

**ਚਿਤਾਵਨੀ:** ਐਗਮੈਟਰਿਕਸ ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲੈਸਟ ਜਾਂ ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।



### ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੀਟਰ

- 1) ਡਿਸਪਲੇ ਏਰੀਆ
- 2) ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਪੋਰਟ
- 3) ਮੀਟਰ ਬਟਨ: ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ।



### ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ

- 1) ਕੰਨਟੈਕਟ ਬਾਰਜ਼: ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ
- 2) ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਫਿਲ ਵਿੰਡੋ: ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੈਂਪਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- 3) ਸੈਂਪਲ ਏਰੀਆ: ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ



### ਲੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ:

- 1) ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈਂਡਲ
- 2) ਡੈਪਥ ਸਿਲੈਕਟਰ
- 3) ਡੈਪਥ
- 4) ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ
- 5) ਲੋਸੈਟ ਇਜੈਕਟਰ
- 6) ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਬਾਂਡੀ
- 7) ਲੋਸੈਟ ਹੋਲਡਰ
- 8) ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਕੈਪ (ਸਾਫ਼)
- 9) ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਾਇਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪ (ਸਾਫ਼)
- 10) ਲੋਸੈਟ
- 11) ਲੋਸੈਟ ਕਵਰ

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਐਗਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਐਪ (ਦ ਐਪ) ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ (ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੁਇਕ ਸਟਾਰਟ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਓਨਰ'ਸ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।


### ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕਦਮ

(ਪੂਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਐਗਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਓਨਰ'ਸ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ)

#### 1 ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ:

ਕੰਨਟੈਕਟ ਬਾਰਜ਼ (ਸੰਪਰਕ ਧਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਪੋਰਟ (ਸਟ੍ਰਿਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

**ਸਾਵਧਾਨੀ:** ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।

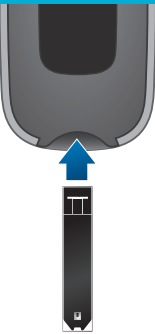

#### 2 ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ (ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ):

ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ।


ਲੈਸਿੰਗ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।



#### 3 ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪੇਟੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਬਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਲੈਸਡ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਾ ਦਬਾਓ।

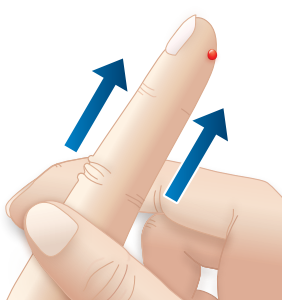

#### 4 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਤੱਕ ਲਿਆਓ:

ਮੀਟਰ, ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।



#### 5 ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਫਿਲ ਵਿੰਡੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਵੋ:

ਸੈਂਪਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਬੀਪ ਕਰੇਗਾ।



ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਫਿਲ ਵਿੰਡੋ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



#### 6 ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਦੇਖੋ:

ਗਣਨਾ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ, ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਮੀਟਰ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਲੋਸੈਟ ਕਵਰ ਬਦਲੋ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੋਸੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਲੋਸੈਟ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।



### ਲੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ


1 ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਤੋਂ ਕੈਪ ਨੂੰ ਮੋੜੋ।




2 ਲੋਸੈਟ ਹੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੋਸੈਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਲੋਸੈਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।



3 ਲੋਸੈਟ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ।

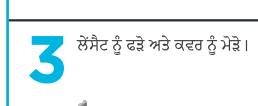

4 ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਕੈਪ ਬਦਲੋ।

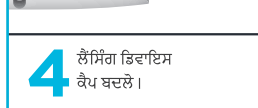


5 ਸਕਿਨ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੈਪਥ (ਤਵੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ) ਭੇਅ ਕਰੋ।



6 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੇ।




6 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੇ।

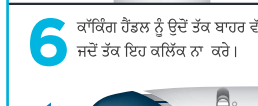

# ਕੁਇਕ ਸਟਾਰਟ ਗਾਈਡ

ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ (AgaMatrix WaveSense JAZZ™)  
ਵਾਇਰਲੈਸ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

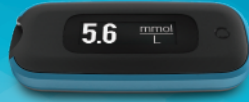

ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ  
**Bluetooth®** ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ

ਨੋਟ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨਜ਼ਰ ਐਪ (ਦ ਐਪ) ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ (ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

## ਬੈਟਰੀਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ) ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ **CR2032** ਜਾਂ **DL2032** ਬੈਟਰੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

### ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸੰਦੇਸ਼



**ਲੋ-ਬੈਟਰੀ ਸੰਦੇਸ਼:** (ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ 2 ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਦਿੱਸੇਗਾ)।  
ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਬੈਟਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬਦਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ **CR2032** ਜਾਂ **DL2032** ਬੈਟਰੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।



**ਡੈਡ-ਬੈਟਰੀ ਸੰਦੇਸ਼:** ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਵਿਚਲੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਟਰੀਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

**ਬੈਟਰੀਜ਼ ਬਦਲਣਾ:** (ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਓਨਰ 'ਸ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।)

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:** ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਿਡ ਡਿਵਾਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ।

ਨੋਟ: ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।


### 1 ਬੈਟਰੀ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ:

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਆਫ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਲਟੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਡੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਇਡ ਕਰੋ।



### 2 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹਟਾਓ:

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪਾਤੁ ਸੰਦ ਨਾਲ ਹਟਾਓ।

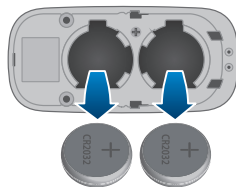


ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼

### 3 ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ:

ਦੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੈਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੜਾ ਲਾਓ।

ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ (+) ਸਾਈਨ ਦੇ ਉਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਓ।

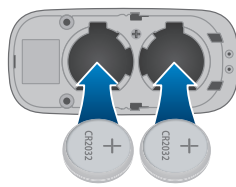

ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼

### 4 ਬੈਟਰੀ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰੋ:

ਬੈਟਰੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਲਾਇਡ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।



ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।

## ਪੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਕਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨਜ਼ਰ ਐਪ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ Android™ ਡਿਵਾਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਧੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਲਈ [www.agamatrix.co.uk](http://www.agamatrix.co.uk) 'ਤੇ ਜਾਓ।

### ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਪ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ

ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਵੇਵ ਸੈਂਸ ਜੈਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਪਣੇ iOS ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨਜ਼ਰ ਐਪ (ਦ ਐਪ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨਜ਼ਰ ਐਪ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬਜਾਏ "----" ਅਤੇ "--/--" ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਗੇ।

### 1 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ:

(ਐਪਲ ਡਿਵਾਇਸ ਲਈ) App Store™ ਤੋਂ ਜਾਂ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਇਸ ਲਈ) Google Play™ ਤੋਂ ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨਜ਼ਰ ਐਪ (ਦ ਐਪ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।




ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਿਡ ਡਿਵਾਇਸ 'ਤੇ ਐਪ ਆਈਕੋਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।



### 2 ਮੇਰੇ ਆਈਕੋਨ ਤੱਕ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ:

ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆਈਕੋਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

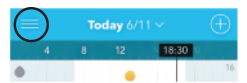

### 3 ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਐਡ ਕਰੋ:

“ਮੀਟਰ” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। “ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਜੋੜੋ” ਟੈਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਮੀਟਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹੇਲਡ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।

### 4 ਪਾਸ-ਕੀ ਐਂਟਰ ਕਰੋ

ਪਾਸ-ਕੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ:

ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 6 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ-ਕੀ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।



### 5 ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ


ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਪ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਸੇਗਾ।

ਸਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ:



### 6 ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ ਕਰੋ:

ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਅਰਡ ਡਿਵਾਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ।

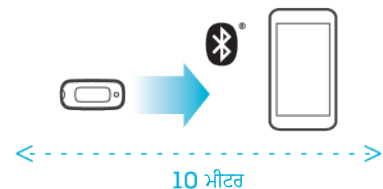

ਨੋਟ: ਡਾਟਾ ਪੇਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



0123 AgaMatrix, Inc. 7C Raymond Ave  
Salem, NH 03079 USA



MDSS GmbH, Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

Bluetooth® ਵਰਤ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਗੋ Bluetooth® SIG, Inc. ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ AgaMatrix, Inc. ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਨੇਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। Apple ਅਤੇ ਐਪਲ ਲੋਗੋ ਯੂ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ Apple Inc., ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ। App Store Apple Inc. ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਕ ਹੈ। Android Google Inc. ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ, Google Play Google Inc. ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।