



يمكن تنزيل تطبيق GDM-Health مجاناً من متجر Apple App store
(لهواتف iPhone) ومن Google Play (لهواتف Android).


يمكن تنزيل التطبيق بسهولة، باتباع التعليمات التالية:

من خلال هاتفك، اذهبي إلى الموقع www.sensynehealth.com/gdm

انقري فوق أيقونة Google Play أو App Store وثبتي التطبيق



ملحوظة: يرجى ملاحظة أنه لأسباب تتعلق بخصوصية البيانات، يتطلب تطبيق GDM-Health منك إعداد رمز أمان على هاتفك.

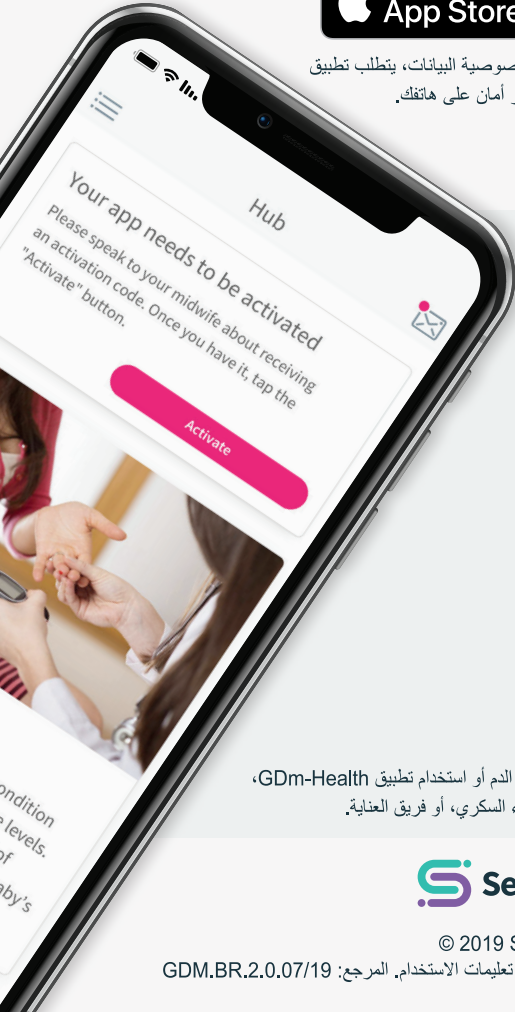

1 افحي التطبيق، انقري فوق 'Activate' (تنشيط)
وأرسلني الكود المكون من 9 أرقام، الذي قدمه لك
فريق العناية بالسكري

2 اقرأ 'Terms of use' (شروط الاستخدام)
ووافق عليها بالنقر فوق 'I agree' (موافق)

إذا كانت لديك أي استفسارات بشأن أخذ قراءات جلوكوز الدم أو استخدام تطبيق GDM-Health،
يرجى الاتصال بالقابلة المتخصصة في داء السكري، أو فريق العناية.

 Sensyne Health

© 2019 Sensyne Health plc

جميع الحقوق محفوظة. معلومات عامة. خاضعة لشروط العقد. راجعي تعليمات الاستخدام. المرجع: GDM.BR.2.0.07/19



توصيل جهاز قياس غلوكوز الدم WaveSense JAZZ WIRELESS بتطبيق Gdm-Health

من السهل إقران جهاز القياس **AgaMatrix WaveSense JAZZ WIRELESS** بجهازك الذكي، كل ما عليك هو اتباع التعليمات التالية:

1. افتحي تطبيق Gdm-Health وانتقلي إلى شاشة 'Hub' (المركز) ثم انقرى فوق "connect to a meter" (توصيل جهاز قياس)
2. انقرى فوق جهاز القياس **WaveSense JAZZ WIRELESS** في قائمة 'Choose meter' (اختيار جهاز قياس)
3. اضغطي باستمرار الزر الموجود على جهاز القياس **WaveSense JAZZ WIRELESS** إلى أن يبدأ رمز Bluetooth في الوميض، ثم انقرى فوق زر "Scan now" (المسح الآن)
4. سيظهر اسم جهاز القياس ورقمه التسلسلي في قائمة أجهزة القياس، انقرى فوقه لبدء عملية الاقتران
5. عند ظهور رسالة المطالبة، أدخلى الرمز المكون من 6 أرقام، المعروف على جهاز القياس، في التطبيق؛ ستظهر رسالة تأكيد بمجرد نجاح الاقتران بجهاز القياس

لمزامنة قراءات غلوكوز الدم من جهاز القياس إلى التطبيق:

1. افتحي تطبيق Gdm-Health وانتقلي إلى شاشة 'Hub' (المركز) ثم انقرى فوق رمز + الكبير بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة
2. انقرى فوق 'Take a BG reading' (أخذ قراءة غلوكوز الدم)
3. اضغطي الزر الموجود على جهاز القياس ثم حرريه، وانقرى فوق 'Scan' (مسح) بالتطبيق لمزامنة آخر القراءات