



اپلیکیشن GDM-Health از فروشگاه اپلیکیشن (iPhone) Apple App store و Google Play (تلفن های Android) به صورت رایگان قابل دانلود است.


دانلود اپلیکیشن آسان است، کفایت دستور العمل های زیر را دنبال کنید:

از طریق تلفن خود به آدرس [www.sensynehealth.com/gdm](http://www.sensynehealth.com/gdm) بروید

بر روی نماد Google Play یا App Store ضربه بزنید و آن را نصب کنید



تذکر: لطفاً توجه داشته باشید، به دلایل حریم شخصی داده ها، GDM-Health شما را ملزم می کند که یک کد امنیتی را بر روی تلفن خود تنظیم کنید.

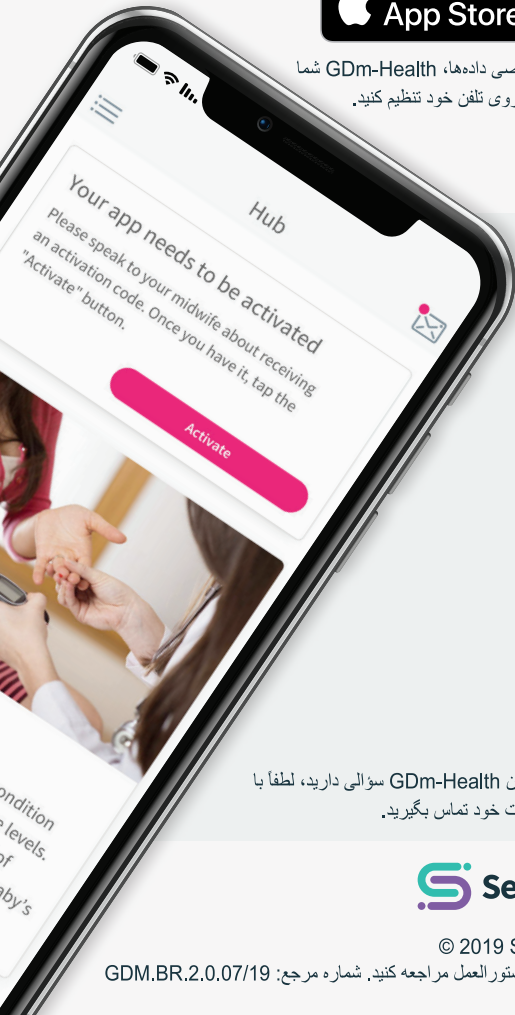

1 اپلیکیشن را باز کنید، روی 'Activate' (فعال سازی) ضربه بزنید و کد 9 رقمی را که تیم مراقبت دیابت شما به شما داده، ارسال کنید

2 با ضربه زدن روی 'I agree' («موافقم»)، 'Terms of use' (شرایط استفاده) را بخوانید و با آن موافقت کنید

اگر در مورد گرفتن تست قند خون با استفاده از اپلیکیشن GDM-Health سوالی دارید، لطفاً با تیم مراقبت یا مامای متخصص دیابت خود تماس بگیرید.

 Sensyne Health

© 2019 Sensyne Health plc

کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات عمومی، مشمول قرارداد. برای استفاده، به دستور العمل مراجعه کنید. شماره مرجع: GDM.BR.2.0.07/19



# دستگاه اندازه‌گیری قند خون WaveSense JAZZ WIRELESS را به اپلیکیشن GDM-Health وصل کنید

جفت‌سازی دستگاه **AgaMatrix WaveSense JAZZ WIRELESS** با دستگاه هوشمند خود آسان است، کافیت دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

1. اپلیکیشن GDM-Health را باز کنید و به صفحه 'Hub' (هاب) بروید، سپس روی "connect to a meter" («اتصال به یک دستگاه») ضربه بزنید
2. روی دستگاه WaveSense JAZZ WIRELESS در فهرست 'Choose meter' («انتخاب دستگاه») ضربه بزنید
3. دکمه روی دستگاه WaveSense JAZZ WIRELESS خود را فشار داده و نگه دارید تا نماد Bluetooth چشمک بزند، سپس روی دکمه "Scan now" («اکنون اسکن کن») ضربه بزنید
4. دستگاه و شماره سریال آن در فهرست دستگاه‌های شما ظاهر می‌شود، روی آن ضربه بزنید تا جفت‌سازی شروع شود
5. کد 6 رقمی نمایش داده شده روی دستگاه خود را در زمان لازم وارد اپلیکیشن کنید؛ هنگامی که دستگاه با موفقیت جفت شد، باید پیام تأیید ظاهر شود

برای همگام‌سازی قرائت‌های قند خون از دستگاه به اپلیکیشن کافیت:

1. اپلیکیشن GDM-Health را باز کنید و به صفحه 'Hub' («هاب») بپیمایش کنید، سپس روی نماد بزرگ + در سمت راست پایین صفحه ضربه بزنید
2. روی 'Take a BG reading' («گرفتن قرائت BG») ضربه بزنید
3. برای همگام‌سازی قرائت‌های اخیر، دکمه روی دستگاه خود را فشار داده و رها کنید و روی 'Scan' («اسکن») در اپلیکیشن ضربه بزنید