



بهرنامه‌ی GDM-Health بیسر امبیره بو داگرتن له بهرنامه‌کانی Apple App store و (مؤبایله‌کانی iPhone) Google Play و (مؤبایله‌کانی Android).


داگرتتی بهرنامه‌که ناسانه، تهنه ئهم خالانه‌ی خوار وه جیبه‌جی بکه:

له‌سه‌ر مؤبایله‌که‌ت، برۆ www.sensynehealth.com/gdm

کرته له‌سه‌ر نایکونی Google Play یاخود App Store بکه و داگرتن بکه



تیببئی: تکایه تیببئی نه‌وه بکه، بو مه‌به‌ستی تایه‌تمه‌ندیتی داتاگان، GDM-Health داوات لیده‌که‌ت که وشه‌ی تیپیری پاراستن دابنیت له‌سه‌ر مؤبایله‌که‌ت.

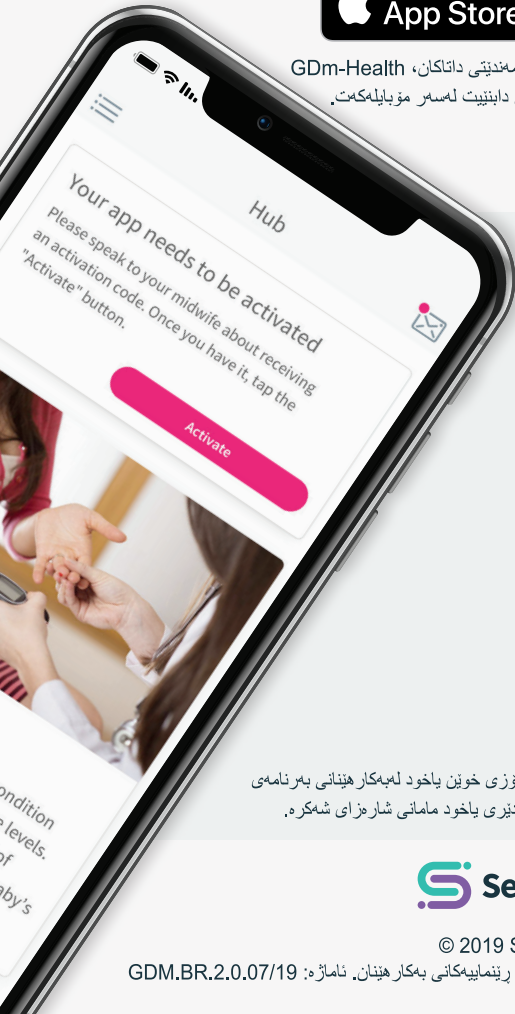

1 بهرنامه‌که بکه‌ر وه، کرته له‌سه‌ر 'Activate' {چالاکبون} بکه و ئه‌و 9 ژماره داخل بکه که تیمی چاودیزی شه‌کره بو‌یان داناویت

2 'Terms of use' {به‌کاره‌ینانی رینماییه‌کان} بخوینهر وه و په‌سه‌ندیان بکه به کرته‌کردن له‌سه‌ر 'I agree' {رازیم}

ئه‌گه‌ر هه‌ر پرسپاریکت هه‌به‌ده‌ر به‌ر وه‌ی خویندنه‌وه‌ی گلوکوزی خوین یاخود له‌به‌کاره‌ینانی بهرنامه‌ی GDM-Health، تکایه په‌یوه‌ندی بکه به تیمی چاودیزی یاخود مامانی شاره‌زای شه‌کره.

 Sensyne Health

© 2019 Sensyne Health plc

هه‌موو مافه‌کان پاریزراون، زانیاری گشتی، به‌گۆزیه‌ی گرێبه‌ست، نامازه بو رینماییه‌کانی به‌کاره‌ینان، نامازه: GDM.BR.2.0.07/19



پیکهوه بنوسی لهگهل WaveSense JAZZ WIRELESS

گلۆکۆز میتهری خوین له بهرنامهی

GDM-Health



پیکهوه بنوسی **Agamatrix WaveSense JAZZ WIRELESS** میتهری نامیره زیره که کهت ناسانه، تهنها دواي رینماییهکانی خوارهوه بکهوه:

1. بهرنامهی GDM-Health بکهروهه و بهدواي شاشهه 'Hub' دا بگهری، دواتر کرته بکه لهسهر "connect to a meter" {پیکهوه بنوسی به میتهرهکهوه}

2. کرته لهسهر WaveSense JAZZ WIRELESS میتهر بکه له لیستی 'Choose meter' {میتهر ههلێزیره}

3. کرته لهسهر دوگمهکه بکه و دهست رابگره لهسهر WaveSense JAZZ WIRELESS میتهرهکهت ههتا نیشانهی Bluetooth دهست دهکات به فلاشلیدان، دواتر کرته بکه لهسهر دوگمهه "Scan now" {نیستا سکان بکه} بکه

4. میتهرهکه و زنجیره ژمارهکه دهردهکهوئیت له لیستی میتهرهکانت، کرته بکه لهسهری و بو دهستپیکردن بهپیکهوه بنوسی

5. کهدهستی پیکرد، 6 ژمارهکه داخل بکهره ناو بهرنامهکه که دهردهکهوئیت لهسهر میتهرهکهت؛ دلنیاکردنهوهیهکه دههئیت دهر بکهوئیت ههسکاتییک میتهرهکه بهسهسکهوتوویی پیکهوه بهسترا

بو ریکهستهوهی خویندنهوهی گلۆکۆزی خوین له میتهرهکهوه بو بهرنامهکه، زور بهسادهی:

1. بهرنامهی GDM-Health بکهروهه و بهدواي شاشهه 'Hub' دابگهری، دواتر کرته بکه لهسهر نیشانهی + لهخوارهوه بهشی راستی شاشهکه

2. کرته لهسهر 'Take a BG reading' بکه

3. دهستت رابگره لهسهر دوگمهه میتهرهکهت و بهرییده و کرته لهسهر 'Scan' {سکان} بکه لهسهر بهرنامهکه بو ریکهستهوهی خویندنهوه نوئیهکان