



Aplikację GDm-Health można pobrać bezpłatnie ze sklepu Apple App Store (iPhone) i Google Play (telefony z systemem Android).

Aplikację można łatwo zainstalować zgodnie z poniższymi instrukcjami:


Na swoim telefonie należy wejść na stronę  
[www.sensynehealth.com/gdm](http://www.sensynehealth.com/gdm)

Następnie należy nacisnąć ikonę Google Play lub App Store i zainstalować aplikację.



Uwaga: Ze względu na ochronę danych GDm-Health wymaga od użytkownika ustawienia kodu zabezpieczającego na telefonie.

- 1 Otwórz aplikację, naciśnij przycisk „Activate” (Aktywuj) i wprowadź 9-cyfrowy kod przekazany przez zespół opieki diabetologicznej.
- 2 Zapoznaj się z treścią „Terms of use” (Warunki użytkowania) i potwierdź swoją zgodę, naciskając przycisk „I agree” (Zgadzam się).

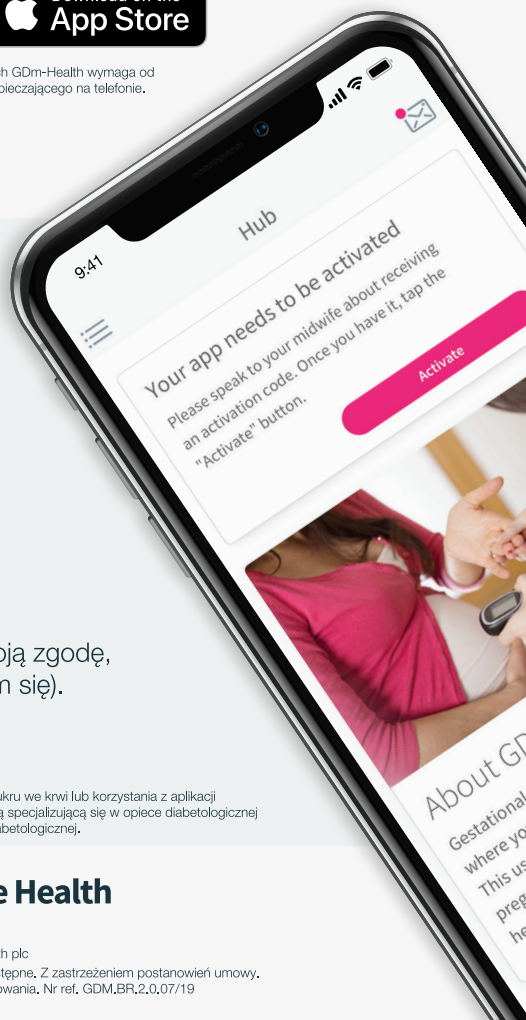

W przypadku pytań na temat badania stężenia cukru we krwi lub korzystania z aplikacji GDm-Health prosimy skontaktować się ze swoją połączoną specjalizującą się w opiece diabetologicznej lub z zespołem opieki diabetologicznej.

 **Sensyne Health**

© 2019 Sensyne Health plc

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólnodostępne. Z zastrzeżeniem postanowień umowy. Należy zapoznać się z instrukcją użytkownika. Nr ref. GDM.BR.2.0.07/19

# Połącz glukometr WaveSense JAZZ WIRELESS z aplikacją GDm-Health




Glukometr WaveSense *JAZZ WIRELESS* firmy AgaMatrix można łatwo sparować ze swoim urządzeniem mobilnym, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Otwórz aplikację GDm-Health i przejdź do ekranu „Hub” (Strona główna), a następnie naciśnij przycisk „Connect to a meter” (Połącz z glukometrem).
2. Wybierz glukometr WaveSense *JAZZ WIRELESS* z listy „Choose meter” (Wybierz urządzenie pomiarowe).
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim glukometrze WaveSense *JAZZ WIRELESS* do momentu, aż symbol Bluetooth zacznie migać, a następnie na ekranie urządzenia mobilnego naciśnij przycisk „Scan now” (Skanuj teraz).
4. Nazwa glukometru wraz z jego numerem seryjnym pojawi się na liście urządzeń pomiarowych. Należy ją wybrać, aby rozpocząć parowanie.
5. Po pojawieniu się komunikatu w aplikacji należy wprowadzić 6-cyfrowy kod wyświetlony na glukometrze. Na ekranie powinno się pojawić potwierdzenie pomyślnego sparowania urządzeń.

.....

Aby zsynchronizować z aplikacją pomiary stężenia glukozy we krwi dokonywane za pomocą glukometru:

1. Otwórz aplikację GDm-Health i przejdź do ekranu „Hub” (Strona główna), a następnie naciśnij duży znak  znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Naciśnij „Take a BG reading” (Pobierz odczyt stężenia glukozy we krwi).
3. Naciśnij i zwolnij przycisk na glukometrze, a następnie naciśnij przycisk „Scan” (Skanuj) w aplikacji, aby zsynchronizować ostatnie odczyty.

7500-10223-PL Rev A | Polish