



Google Play اور (iPhone) Apple App store ایپ GDm-Health (Android فون) سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔


ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا آسان ہے، صرف ذیل میں دی گئی ہدایات کی پیروی کریں:

اپنے فون پر، ملاحظہ کریں www.sensynehealth.com/gdm

Google Play یا App Store پر تھپتھپائیں اور تنصیب کریں



نوٹ: براہ مہربانی نوٹ فرمائیں، ڈیٹا کی رازداری کے مقصد سے، GDm-Health کو درکار ہے کہ آپ اپنے فون میں ایک سلامتی پاس کوڈ ترتیب دیں۔

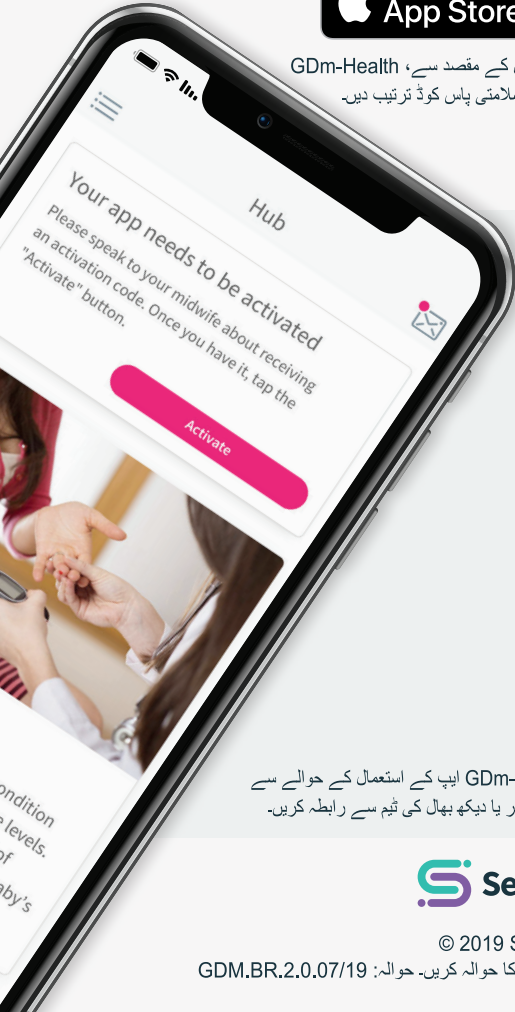

1 ایپ کو کھولیں اور تھپتھپائیں 'Activate' (فعال کریں) اور 9-عدد کا کوڈ ارسال کریں جو آپ کی ذیابیطس دیکھ بھال ٹیم نے آپ کو فراہم کیا ہے

2 'Terms of use' (شرائط استعمال) کو پڑھیں اور ان سے اتفاق کرنے کے لیے تھپتھپائیں 'I agree' (میں اتفاق کرتا ہوں)

اگر آپ کو خون میں گلوکوز کا مطالعہ کرنے یا GDm-Health ایپ کے استعمال کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو براہ مہربانی اپنی ذیابیطس کی ماہر یا دیکھ بھال کی ٹیم سے رابطہ کریں۔

 Sensyne Health

© 2019 Sensyne Health plc

معلومات عامہ معاہدے سے مشروط استعمال کے لیے ہدایات کا حوالہ کریں۔ حوالہ: GDM.BR.2.0.07/19



ایک WaveSense JAZZ WIRELESS بلڈ گلوکوز میٹر کو GDM-Health ایپ کے ساتھ جوڑیں

Agamatrix WaveSense JAZZ WIRELESS میٹر کو اپنے سمارٹ آلہ کے ساتھ جوڑنا بنانا آسان ہے، صرف ذیل میں دی گئی ہدایات کی پیروی کریں:

1. GDM-Health ایپ کھولیں اور 'Hub' (حب) سکرین پر گشت کریں، پھر تھپتھپائیں "connect to a meter" (ایک میٹر سے جوڑیں)

2. WaveSense JAZZ WIRELESS میٹر پر تھپتھپائیں جو میٹر 'Choose meter' (انتخاب فہرست) میں موجود ہے

3. اپنے WaveSense JAZZ WIRELESS میٹر پر بٹن کو دبائیں اور تھامے رکھیں جب تک Bluetooth کی علامت فلش کرنا شروع کر دے، پھر بٹن "Scan now" (ابھی سکین کریں) تھپتھپائیں

4. میٹر اور اس کا سیریل نمبر آپ کی فہرست میٹر میں ظاہر ہو گا، جوڑنا بنانا شروع کرنے کے لیے اس پر تھپتھپائیں

5. جب ظاہر ہو جائے، 6-عدد کا کوڈ جو آپ کے میٹر پر ظاہر کیا گیا ہے اسے ایپ میں داخل کریں؛ جوڑنا کامیابی سے بننے پر تصدیق ظاہر ہو گی

بلڈ گلوکوز کا مطالعہ میٹر سے ایپ میں ہم آہنگ کرنے کے لیے صرف مندرجہ ذیل کرنے کی ضرورت ہے:

1. GDM-Health ایپ کھولیں اور 'Hub' (حب) سکرین تک گشت کریں، پھر + کی بڑی علامت کو تھپتھپائیں جو سکرین پر نیچے دائیں جانب موجود ہے

2. تھپتھپائیں 'Take a BG reading' (بلڈ گلوکوز مطالعہ حاصل کریں)

3. اپنے میٹر پر بٹن کو دبائیں اور چھوڑیں اور حالیہ مطالعہ کی ہم آہنگی کے لیے ایپ پر تھپتھپائیں 'Scan' (سکین)