



iPhone用户可从Apple App Store免费下载GDm-Health应用程序，Android手机用户则可通过Google Play免费下载。

下载这款应用程序十分简单，只需按照以下说明进行操作即可：


在手机上访问www.sensynehealth.com/gdm

点击Google Play或App Store图标，然后安装



请注意，为了保护数据隐私，GDm-Health要求您在手机上设置安全密码。

- 1 打开应用程序，点击“Activate”（激活），然后提交您的糖尿病护理团队为您提供的9位代码
- 2 阅读“Terms of use”（使用条款），并点击“I agree”（我同意）

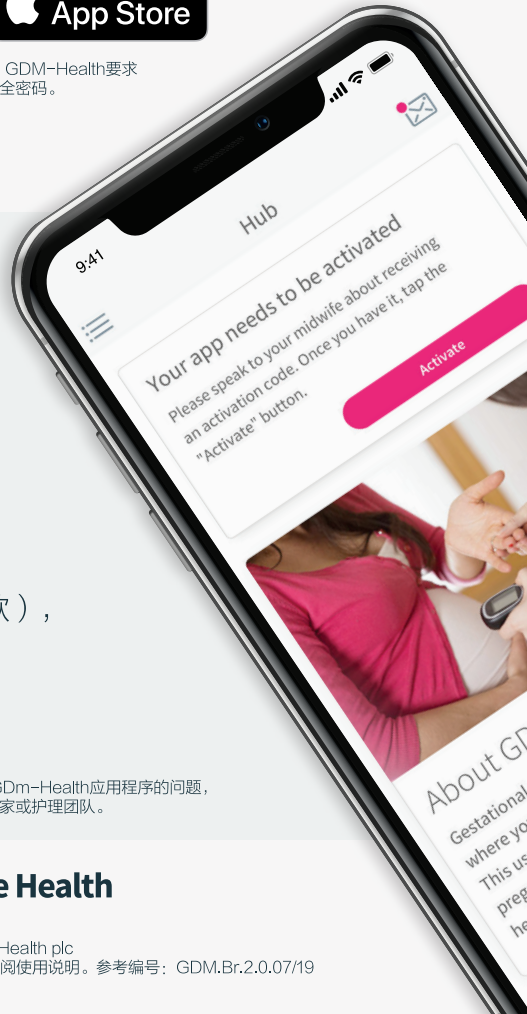

如果您有任何关于读取血糖读数或使用GDm-Health应用程序的问题，请联系您的糖尿病护理专家或护理团队。



将WaveSense JAZZ WIRELESS血糖仪连接到 GDm-Health应用程序



将AgaMatrix WaveSense JAZZ WIRELESS 血糖仪与您的智能设备进行配对十分简单，只需按照以下说明进行操作即可：

1. 打开GDm-Health应用程序，导航到“Hub”（中心）屏幕，然后点击“Connect to a meter”（连接血糖仪）
2. 点击“Choose meter”（选择血糖仪）列表中的WaveSense JAZZ WIRELESS血糖仪
3. 按住WaveSense JAZZ WIRELESS血糖仪的按钮，直到Bluetooth符号开始闪烁，然后点击“Scan now”（立即扫描）按钮
4. 血糖仪及其序列号将出现在您的血糖仪列表中，点击并开始配对
5. 根据提示，将血糖仪上显示的6位代码输入应用程序；血糖仪配对成功后，将会显示确认

如需将血糖读数从血糖仪同步到应用程序，只需执行以下操作：

1. 打开GDm-Health应用程序，导航到“Hub”（中心）屏幕，然后点击屏幕右下角的大加号（+）
2. 点击“Take a BG reading”（读取血糖读数）
3. 按下并松开血糖仪上的按钮，然后点击应用程序上的“Scan”（扫描），同步最近的读数

7500-10223-ZH Rev B | Chinese