

Canllaw Cychwyn Cyflym

AgaMatrix WaveSense JAZZ™ System Monitro Glwcos Gwaed

Gofal Cwsmeriaid: 0800 093 1812

Os bydd argyfwng, cysylltwch â'ch gweithiwr gofal iechyd neu ymateb meddygol brys.



AgaMatrix

CYWIRDEB
EN ISO 15197:2015

DIM COD

Mae batris sbâr wedi eu cynnwys gyda'ch mesurydd!

Mae dau fatri sbâr lithiwm, 3-folt CR2032 wedi eu cynnwys yng nghas cludo eich mesurydd. Gweler y cyfarwyddiadau ar y cefn ar gyfer newid batris.



Ynghylch System AgaMatrix WaveSense JAZZ

Mae System Monitro Glwcos Gwaed AgaMatrix WaveSense JAZZ yn eich galluogi i wirio eich lefelau glwcos gyda gwaed cyfan. I weld y cyfarwyddiadau llawn, gweler eich Canllaw Perchennog AgaMatrix WaveSense JAZZ.



Mesurydd Glowcos Gwaed

- 1) Arddangos
- 2) Botwm TIC: cadarnhau neu ddedol
- 3) Botwm Saeth I LAWR: sgrolio ymlaen
- 4) Botwm Saeth I FYNY: sgrolio yn ôl
- 5) Botwm GOLAU ÔL
- 6) Porth Striped Profi



Striped Profi

- 1) Bariau Cyswllt: rhowch y pen yma yn y porth striped profi
- 2) Ffenestr Llenwad Gweledol: mae'n llenwi'n llwyr pan fydd digon o sampl wedi ei weithredu
- 3) Ardal Sampl: rhoddir gwaed neu doddiant rheoli yma



System Pigo

- 1) Carn Cliced
- 2) Detholwr Dyfnder
- 3) Dyfnder
- 4) Botwm Rhyddhau
- 5) Alldafwr Pigyn
- 6) Corff y Ddyfais Pigo
- 7) Daliwr Pigyn
- 8) Cap y Ddyfais Pigo
- 9) Cap Profi Safle Amgen (Clir)
- 10) Pigyn
- 11) Gorchudd Pigyn


RHYBUDD: RHAID defnyddio'r Ddyfais Pigo AgaMatrix i gael sampl gwaed gan un person YN UNIG ar gyfer hunanbrofi. Peidiwch â defnyddio unrhyw bigyn na dyfais pigo mae rhywun arall wedi ei defnyddio.

Camau Sylfaenol (I weld y cyfarwyddiadau llawn, gweler eich Canllaw Perchennog AgaMatrix WaveSense JAZZ)

1 Rhowch y striped profi yn y mesurydd:

Rhowch y striped profi, gyda'r bariau cyswllt yn wynebu i fyny, yn y porth striped profi. Bydd y mesurydd yn cael ei ysgogi'n awtomatig.


RHYBUDD: I sicrhau canlyniadau cywir, golchwch eich dwylo gyda dŵr cynnes, sebonllyd a'u sychu cyn pob prawf.

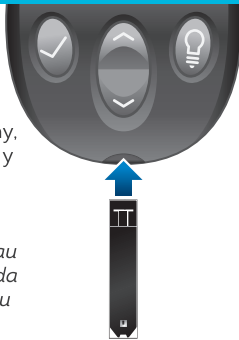

2 Pigwch yr ardal brawf:

Gweler y cyfarwyddiadau ar sut i baratoi'r ddyfais pigo, ar y dde.


Pwyswch y ddyfais pigo yn erbyn y safle i'w bigo a gwasgwch y botwm rhyddhau.

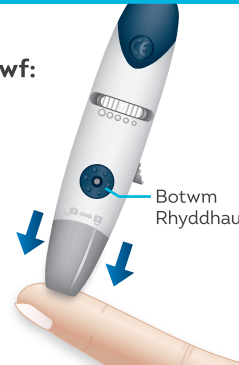

3 Casglu diferyn gwaed:


Sychwch y diferyn cyntaf o waed sy'n ymddangos yn defnyddio hances bapur neu dywel papur glân.

Gwasgwch o waelod eich bys tuag at y blaen, nes bydd ail ddiferyn bychan o waed yn ffurfio.

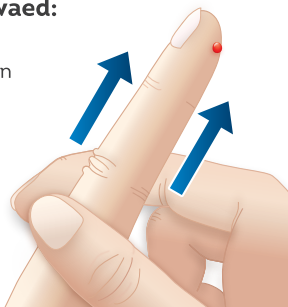

4 Dewch â'r striped profi at y sampl gwaed:


Mae'r striped profi yn sugno'r gwaed i mewn i'r striped profi trwy'r ardal sampl.

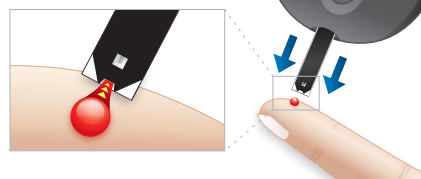

5 Tynnwch y striped profi oddi ar y sampl gwaed pan fyddwch yn clywed y bîp:

Bydd eich mesurydd yn bipian unwaith pan fydd angen i chi dynnu blaen y striped profi o'ch sampl gwaed. Mae'r bar sgrolio ac 1-2-3 yn dangos bod y mesurydd yn cyfrifo'ch canlyniad.

((BÎP))

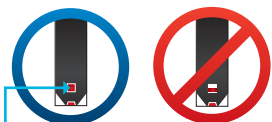


Bydd y ffenestr llenwad gweledol i gyd yn troi'n goch.



6 Camau olaf:


Mae canlyniad eich prawf yn cael ei arddangos ar y mesurydd ynghyd â thag amser bywd (yn fflachio). Gwasgwch ar y botwm TIC i'w gadarnhau. I newid y tag neu am ragor o fanylion, gweler eich canllaw perchennog.

Tynnwch y striped profi a ddefnyddiwyd. Bydd y mesurydd yn diffodd yn awtomatig. Trowch gap y ddyfais pigo i ffwrdd a rhowch y gorchudd pigyn yn ôl yn ei le. Tynnwch y pigyn a ddefnyddiwyd. Gwaredwch y striped a'r pigyn sydd wedi eu defnyddio yn briodol.

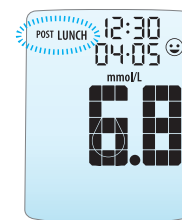


Paratoi'r System Pigo


1 Trowch y cap oddi ar y ddyfais pigo.

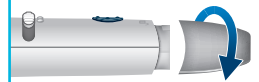

2 Rhowch bigyn newydd i mewn i'r daliwr pigyn yn gadarn. Gwasgwch y botwm rhyddhau i ddangos mwy o'r pigyn.

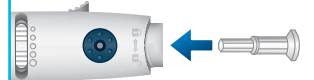


3 Daliwch y pigyn a throiw'r gorchudd oddi arno.

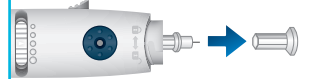

4 Rhowch gap y ddyfais pigo yn ei ôl.



5 Gosodwch y dyfnder trywanu croen.

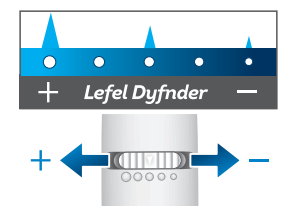

6 Tynnwch y carn cliced allan nes ei fod yn clicio.





PWYSIG: Defnyddiwch fatris CR2032 neu DL2032 yn unig gyda'r mesurydd hwn. Ffoniwch Gofal Cwsmeriaid ar 0800 093 1812 am gymorth.

Ynghylch Batris y Mesurydd AgaMatrix WaveSense JAZZ



Mae gan y Mesurydd AgaMatrix WaveSense JAZZ ddau fatri lithiwm CR2032, 3-folt tu fewn.

Batri #1: yn pweru'r golau ôl yn unig

Batri #2: yn pweru swyddogaethau profi a dewislen y mesurydd

Negeseuon Arddangos Batri



Neges Batri Isel: Neges yn fflachio
YSTYR: Mae Batri #2 yn eich mesurydd yn isel. Mae'n dal yn bosibl defnyddio eich mesurydd ar gyfer profion.



Neges Batri Gwag: Neges yn fflachio
YSTYR: Mae Batri #2 eich mesurydd wedi darfod. Ni ellir defnyddio'r mesurydd ar gyfer profion nes byddwch wedi newid Batri #2.



Batri Golau Ôl Isel: Mae'r golau ôl yn fflachio pan fydd y defnyddiwr yn gwasgu'r botwm GOLAU ÔL (☀) button.
YSTYR: Mae Batri #1 eich mesurydd yn isel. Mae'n dal yn bosibl defnyddio eich mesurydd ar gyfer profion.

Os bydd Neges Batri Isel neu Wag yn arddangos ar eich mesurydd, NEWIDIWCH A CHAEL GWARED AR FATRI #2 YN UNIG.

Amnewid y Batris (I gael rhagor o fanylion, gweler eich Canllaw Perchennog AgaMatrix WaveSense JAZZ)


1 Agorwch ddrws y batri:

Sicrhewch fod y mesurydd wedi ei ddiffodd. Trowch y mesurydd fel eich bod yn edrych ar ddrws y batri. Gwthiwch glip drws y batri i'r dde i'w agor. Tynnwch ddrws y batri. Byddwch yn ofalus nad ydych yn colli drws y batri.




2 I amnewid batri'r mesurydd (#2):

Tynnwch y batri sydd wedi darfod, tynnwch y tab priodol i gael y batri allan. **Mae batri sbâr wedi ei gynnwys ym mhoced cas cludo eich mesurydd.** Lleolwch y batri sbâr newydd. Rhowch y batri newydd i mewn gyda'r arwydd positif (+) yn wynebu i fyny tuag atoch chi.

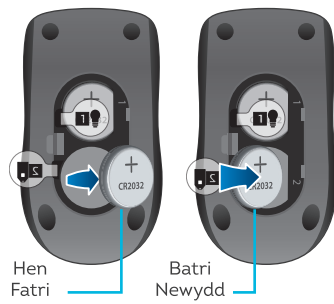

3 I amnewid batri'r golau ôl (#1):

Tynnwch y batri sydd wedi darfod, tynnwch y tab priodol i gael y batri allan. **Mae batri sbâr wedi ei gynnwys ym mhoced cas cludo eich mesurydd.** Lleolwch y batri sbâr newydd. Rhowch y batri newydd i mewn gyda'r arwydd positif (+) yn wynebu i fyny tuag atoch chi.

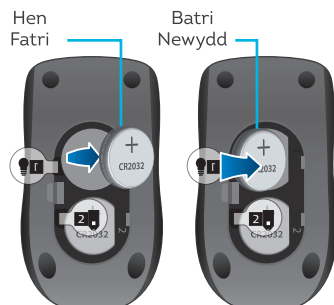

4 Caewch ddrws y batri:

Rhowch ddrws y batri ar ongl yn erbyn y mesurydd a'i wasgu i lawr nes bydd yn snapio'n ysgafn i'w le. Sicrhewch fod y tagiau plastig wedi eu gthio dan ddrws y batri. Gwnewch yn siŵr bod drws y batri wedi ei gau'n llwyr cyn defnyddio. Gwaredwch y batris yn unol â'ch rheoliadau amgylcheddol lleol.



Gosodiad Amser a Dyddiad wedi Amnewid Batri

PWYSIG: Pan fydd y mesurydd wedi ei ddiffodd a'ch bod yn newid batri #2, efallai y byddwch yn colli'r wybodaeth amser a dyddiad wedi tynnu'r batri o'r mesurydd. Os bydd hyn yn digwydd, trowch y mesurydd ymlaen wedi gosod y batri newydd a bydd yn eich ysgogi i osod yr amser a'r dyddiad.

Os oes angen gosod dyddiad ac amser, bydd y gair "SET" yn cael ei arddangos y tro cyntaf bydd y mesurydd yn troi ymlaen wrth wasgu'r botwm TIC (✓) neu roi strïbed profi i mewn.

Sylwer: Mae'r mesurydd yn cadw'r fformat dyddiad ac amser [amser 24 neu 12 awr, M-d (Mis-Dydd) neu d-M (Dydd-Mis)].

1 Gosod y flwyddyn:

Gosodwch y flwyddyn (fflachio) gyda'r botymau saeth I LAWYR (✓) neu I FYNY (∧). Gwasgwch ar y botwm TIC (✓) i gadarnhau eich detholiad.



2 Gosod y mis:

Gosodwch y mis (fflachio) gyda'r botymau saeth I LAWYR (✓) neu I FYNY (∧). Gwasgwch ar y botwm TIC (✓) i gadarnhau eich detholiad.



3 Gosod y dydd:

Gosodwch y dydd (fflachio) gyda'r botymau saeth I LAWYR (✓) neu I FYNY (∧). Gwasgwch ar y botwm TIC (✓) i gadarnhau eich detholiad.



4 Gosod yr awr

Gosodwch yr awr (fflachio) gyda'r botymau saeth I LAWYR (✓) neu I FYNY (∧). Gwasgwch ar y botwm TIC (✓) i gadarnhau eich detholiad.



5 Gosod y munudau:

Gosodwch y munudau (fflachio) gyda'r botymau saeth I LAWYR (✓) neu I FYNY (∧). Gwasgwch ar y botwm TIC (✓) i gadarnhau eich detholiad. Os cafodd y mesurydd ei droi ymlaen trwy fewnosod strïbed profi, mae gwasgu TIC (✓) yn eich galluogi i gwblhau prawf. Os cafodd y mesurydd ei droi ymlaen yn defnyddio'r botwm TIC (✓), bydd y mesurydd yn cychwyn yn y modd dewislen.

