



# اپلیکیشن GDM-Health از فروشگاه اپلیکیشن (iPhone) Apple App store و Google Play (تلفن های Android) به صورت رایگان قابل دانلود است.

دانلود اپلیکیشن آسان است، کفایت دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

روی تلفن همراه خود، به قسمت آپ استور (App Store) یا گوگل پلی (Google Play) بروید.



تذکر: لطفاً توجه داشته باشید، به دلایل حریم شخصی داده ها، GDM-Health شما را ملزم می کند که یک کد امنیتی را بر روی تلفن خود تنظیم کنید.



1 اپلیکیشن جی. دی. ام. هلت (GDM-Health) را جستجو کرده و سپس آن را انتخاب کنید. این اپلیکیشن را دانلود کرده و نصب کنید.

2 اپلیکیشن را باز کنید، روی 'Activate' (فعال سازی) ضربه بزنید و کد 9 رقمی را که تیم مراقبت دیابت شما به شما داده، ارسال کنید

3 روی کلمه Next ضربه بزنید و تاریخ تولد خود را وارد کنید

4 با ضربه زدن روی 'I agree' («موافقم»)، 'Terms of use' («شرایط استفاده») را بخوانید و با آن موافقت کنید

اگر در مورد گرفتن تست قند خون یا استفاده از اپلیکیشن GDM-Health سوالی دارید، لطفاً با تیم مراقبت یا مامای متخصص دیابت خود تماس بگیرید.



© 2024 Huma Therapeutics

کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات عمومی. مشمول قرارداد. برای استفاده، به دستورالعمل مراجعه کنید. شماره مرجع اپل (Apple) یک علامت تجاری از شرکت اپل است. آپ استور (App Store) یک علامت خدماتی از شرکت اپل است. اندروید (Android)، گوگل پلی (Google Play) و لوگوی گوگل پلی علامت تجاری شرکت گوگل (Google LLC) هستند.



# دستگاه اندازه‌گیری قند خون WaveSense JAZZ WIRELESS را به اپلیکیشن GDM-Health وصل کنید

جفت‌سازی دستگاه **AgaMatrix WaveSense JAZZ WIRELESS** با دستگاه هوشمند خود آسان است، کافیت دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

1. اپلیکیشن GDM-Health را باز کنید و به صفحه 'Hub' (هاب) بروید، سپس روی "connect to a meter" («اتصال به یک دستگاه») ضربه بزنید
2. روی دستگاه **WaveSense JAZZ WIRELESS** در فهرست 'Choose meter' («انتخاب دستگاه») ضربه بزنید
3. دکمه روی دستگاه **WaveSense JAZZ WIRELESS** خود را فشار داده و نگاه دارید تا نماد Bluetooth چشمک بزند، سپس روی دکمه "Scan now" («اکنون اسکن کن») ضربه بزنید
4. دستگاه و شماره سریال آن در فهرست دستگاه‌های شما ظاهر می‌شود، روی آن ضربه بزنید تا جفت‌سازی شروع شود
5. کد 6 رقمی نمایش داده شده روی دستگاه خود را در زمان لازم وارد اپلیکیشن کنید؛ هنگامی که دستگاه با موفقیت جفت شد، باید پیام تأیید ظاهر شود

برای همگام‌سازی قرائت‌های قند خون از دستگاه به اپلیکیشن کافیت:

1. اپلیکیشن GDM-Health را باز کنید و به صفحه 'Hub' («هاب») بپیمایش کنید، سپس روی نماد بزرگ + در سمت راست پایین صفحه ضربه بزنید
2. روی 'Take a BG reading' («گرفتن قرائت BG») ضربه بزنید
3. برای همگام‌سازی قرائت‌های اخیر، دکمه روی دستگاه خود را فشار داده و رها کنید و روی 'Scan' («اسکن») در اپلیکیشن ضربه بزنید