



GDm-Health एप Apple App store (iPhone) र Google Play (Android फोनहरू) बाट डाउनलोड गर्न नि: शुल्क छ।

अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सजिलो छ, तलका निर्देशनहरूको मात्र पालना गर्नुहोस्:

आफ्नो फोनको App Store वा Google Play नेभिगेट गर्नुहोस्।



नोट: कृपया नोट गर्नुहोस्, डाटा गोपनीयताको कारण, GDm-Health लाई तपाईंले आफ्नो फोनमा सेट गर्नुभएको सुरक्षा पासकोड चाहिन्छ।

- 1 सर्च गर्नुहोस् र GDm-Health एप चयन गर्नुहोस्, एप डाउनलोड गर्नुहोस् र इन्स्टल गर्नुहोस्।
- 2 अनुप्रयोग खोल्नुहोस्, 'Activate (सक्रिय गर्नुहोस्)' ट्याप गरि तपाईंको मधुमेह हेरचाह टोलीले तपाईंलाई पठाएको 9-अंकको कोड पेश गर्नुहोस्
- 3 नेक्स्ट ट्याप गर्नुहोस् र आफ्नो जन्म मिति पेश गर्नुहोस्।
- 4 'I agree (म सहमत छु)' मा ट्याप गरेर 'Terms of use (प्रयोगको सर्तहरू)' मा पढि सहमत हुनुहोस्

यदि तपाईंको लिएका रगत ग्लुकोज हेर्ने वा GDm-Health एपको प्रयोग गर्ने बारे कुनै प्रश्नहरू भएमा, कृपया तपाईंको मधुमेह विशेषज्ञ सुडेनी वा हेरचाह टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

 H U M A

© 2024 Huma Therapeutics

सर्वाधिकार सुरक्षित। सार्वजनिक जानकारी। सम्झौताको अन्तर्गत। प्रयोगको लागि निर्देशन सन्दर्भ गर्नुहोस्। रेफरी Apple Inc. को ट्रेडमार्क हो, App Store Apple Inc. को सर्भिस चिन्ह हो। Android, Google Play र Google Play का लोगोहरू Google LLC का ट्रेडमार्कहरू हुन्।



एक WaveSense JAZZ WIRELESS रगत ग्लुकोज मिटरलाई GDm-Health एपमा कनेक्ट गर्नुहोस्



तपाईंको स्मार्ट उपकरणमा AgaMatrix WaveSense JAZZ WIRELESS मिटर पेयर गर्न सजिलो छ, तलका निर्देशनहरूको मात्र पालना गर्नुहोस्:

1. GDm-Health एप खोल्नुहोस् र 'Hub (हब)' स्क्रिनमा नेभिगेट गर्नुहोस्, त्यसपछि 'connect to a meter (एक मिटरमा कनेक्ट गर्नुहोस्)' ट्याप गर्नुहोस्
2. 'Choose meter (छनौट मिटर)' सूचीमा WaveSense JAZZ WIRELESS मिटर ट्याप गर्नुहोस्
3. Bluetooth प्रतीक फ्ल्यास सुरु नभएसम्म तपाईंको WaveSense JAZZ WIRELESS मीटरमा बटन थिचि होल्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि 'Scan now (अब स्क्यान गर्नुहोस्)' बटन ट्याप गर्नुहोस्
4. तपाईंको मिटरको सूचीमा मिटर र यसको सिरियल नम्बर देखा पर्नेछ, पेयर गर्न यसमा ट्याप गर्नुहोस्
5. प्रोम्ट गरिदा, तपाईंको मीटरको एपमा देखाइएको 6- अंकको कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्; मिटर सफलतापूर्वक पेयर भएपछि एक पुष्टिकरण देखिनु पर्नेछ

मिटरबाट एपमा सामान्य रूपले रगत ग्लुकोज पठन सिङ्क गर्न:

1. GDm-Health एप खोल्नुहोस् र 'Hub (हब)' स्क्रिनमा नेभिगेट गर्नुहोस्, त्यसपछि स्क्रिनको तल दायाँ ठूलो + चिन्ह ट्याप गर्नुहोस्
2. 'Taking a BG reading (एक BG रिडिङ लिने)' ट्याप गर्नुहोस्
3. तपाईंको मिटरमा बटन थिचि छोड्नुहोस् र भर्खरको रिडिङ सिङ्क गर्न एपमा 'Scan (स्क्यान)' ट्याप गर्नुहोस्