



Aplicația GDm-Health se poate descărca gratuit din Apple App store (iPhone) și Google Play (pe telefoanele Android).

Aplicația se descarcă ușor. Doar urmați instrucțiunile de mai jos:

Accesați App Store sau Google Play de pe telefonul dvs.



Notă: vă rugăm să rețineți că, din motive ce țin de confidențialitatea datelor, GDm-Health necesită ca dvs. să setați un cod de acces pe telefonul dvs.

- 1 Căutați și selectați aplicația GDm-Health. Descărcați și instalați aplicația.
- 2 Deschideți aplicația, apăsați 'Activate' (Activare) și trimiteți codul din 9 cifre pe care echipa de îngrijire a persoanelor diabetice vi l-a furnizat.
- 3 Atingeți Next (Înainte) și trimiteți data nașterii.
- 4 Citiți și acceptați 'Terms of use' (Termenii de utilizare), apăsând pe 'I agree' (Sunt de acord)



Dacă aveți orice întrebări privind măsurarea glicemiei sau utilizarea aplicației GDm-Health, contactați asistenta specializată în diabet sau echipa de îngrijire.

 H U M A

© 2024 Huma Therapeutics

Toate drepturile rezervate. Informații publice. Face obiectul unui contract. Consultați instrucțiunile de utilizare. Apple este o marcă comercială a Apple Inc. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc. Android, Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

# Conectați un glucometru WaveSense *JAZZ WIRELESS* la aplicația GDM-Health



Împerecherea glucometrului AgaMatrix WaveSense *JAZZ WIRELESS* cu dispozitivul dvs. smart este foarte simplă. Doar urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Deschideți aplicația GDM-Health și navigați la ecranul 'Hub' (Centru de activitate), apoi apăsați "Connect to a meter" (Conectare la un glucometru)
2. Apăsați pe opțiunea Glucometru WaveSense *JAZZ WIRELESS* în lista 'Choose meter' (Alegeți glucometru)
3. Apăsați lung butonul de pe glucometrul dvs. WaveSense *JAZZ WIRELESS*, până când simbolul Bluetooth începe să clipească, apoi apăsați butonul "Scan now" (Scațați acum)
4. Glucometrul și numărul de serie al acestuia vor apărea în lista dvs. de glucometre. Apăsați pe acesta pentru a începe împerecherea
5. Când vi se solicită, introduceți în aplicație codul de 6 cifre afișat pe glucometru; va apărea o confirmare odată ce glucometrul este împerecheat cu succes

Pentru a sincroniza rezultatele glicemiei de pe glucometru cu aplicația:

1. Deschideți aplicația GDM-Health și navigați la ecranul 'Hub' (Centru de activitate), apoi apăsați simbolul mare **+** din partea dreaptă jos a ecranului
2. Apăsați 'Take a BG reading' (Măsurați nivelul glicemiei)
3. Apăsați scurt butonul de pe glucometru și apăsați 'Scan' (Scanare) în aplicație pentru a sincroniza rezultatele

7500-10223-RO Rev B | Romanian